

Sillón Tívoli

Manual de Uso

Be well, Live well
Wellell

V1-28/10/2024

Índice

1.	MANUAL	Pag. 4
1.1	Manual de uso y mantenimiento	4
1.2	Usos para los que está destinado	4
1.3	Símbolos y su significado	4
1.4	Ejemplos de los símbolos	5
2.	PRECAUCIONES DE USO (ESTRUCTURA/SILLÓN)	6
2.1	Precauciones de uso	6
2.2	Precauciones utilización	7
2.3	Precauciones eléctricas	7
2.4	Consejos para el usuario final del producto	8
2.5	Advertencias para el posicionamiento del sillón	9
2.6	Espacio y precauciones para reclinar el respaldo	9
2.7	Precauciones sobre el acolchado: Advertencias	10
2.8	Consejos sobre el acolchado:	10
3.	INSTRUCCIONES DE USO DEL SILLÓN TÍVOLI	11
3.1	Funciones del mando	11
4.	MANTENIMIENTO Y CUIDADOS (ESTRUCTURA/SILLÓN)	12
4.1	Método de mantenimiento	12
4.2	Mantenimiento del mando	12
5.	DESECHAR EL PRODUCTO	13
5.1	Información a los usuarios	13
6.	CARACTERÍSTICAS GENERALES SILLÓN TÍVOLI	14
7.	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	15
8.	DUDAS Y SOLUCIONES EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO	16
9.	GARANTÍA	17

1. MANUAL

1.1 Manual de uso y mantenimiento

El presente manual de uso y mantenimiento junto con las indicaciones contenidas en la etiqueta, constituyen la información suministrada por el fabricante.

Cada dispositivo debe estar acompañado de la información necesaria para garantizar un uso seguro teniendo en cuenta la formación y conocimientos de los usuarios potenciales.

Este manual debe conservarse con extremo cuidado; está dirigido a los usuarios, al propietario y a los encargados de su mantenimiento.

Suministra información sobre las características técnicas, el uso correcto del aparato, conservación, mantenimiento, eliminación y sobre las disposiciones de seguridad relacionadas.

1.2 Usos para los que está destinado

El sillón Tivoli funciona mediante alimentación eléctrica y el uso previsto por el fabricante es que se sienten en el personas que necesitan ayuda para ponerse en alguna posición determinada o simplemente para su relajación. Quedan excluidas aplicaciones especiales o que requieren requisitos particulares. Soporte pacientes de hasta 130 kg de peso.

Especificaciones técnicas	
Dimensiones plegadas (largo x ancho x alto)	94 X 75 X 99 cm
Peso del producto	38 kg
Medidas del asiento (largo x ancho)	53 x 53 cm
Altura del apoyabrazos hasta el suelo	60 cm
Respaldo (ancho x alto)	56x 66 cm
Motor	100 - 240V, 50 - 60 Hz, 3.0A
Peso máximo soportado	130 kg

1. MANUAL

IMPORTANTE La lista de precauciones indicadas son para evitar daños a personas o a objetos y se ruega prestarles la máxima atención. Para ilustrar el grado de peligro o daños, se utilizarán los siguientes símbolos de ATENCIÓN y MÁXIMA ATENCIÓN.

1.3 Símbolos y su significado



MÁXIMA ATENCIÓN

Posibilidad de daños graves o muerte.

ATENCIÓN

Posibilidad de daños a personas u objetos. Se entiende como "daños a objetos": muebles, accesorios y animales en general.

1.4 Ejemplos de los símbolos



El símbolo del triángulo indica "Atención". El contenido del mensaje irá acompañado de una explicación, escrita o en imágenes, colocada dentro o cerca del símbolo. En este caso concreto de la izquierda se indica "peligro de descarga eléctrica".



El círculo con la barra atravesada indica "prohibido". El contenido del mensaje irá acompañado de una explicación, escrita o en imágenes, colocada dentro o cerca del símbolo. En este caso concreto de la izquierda se indica "peligro de desmontar el producto".



Este símbolo indica "Normas a respetar imperativamente". El contenido del mensaje irá acompañado de una explicación, escrita o en imágenes, colocada dentro o cerca del símbolo. En este caso concreto de la izquierda se indican "las normas generales".



Atención tensión peligrosa



Dispositivos móviles



Peligro de aplastamiento pies



Peligro de aplastamiento manos



Consultar el manual de instrucciones

2. PRECAUCIONES DE USO (ESTRUCTURA/SILLÓN)

2.1 Precauciones de uso

¡MÁXIMA ATENCIÓN!

En caso de que el dispositivo funcione mal o no funcione, interrumpir inmediatamente su uso, apagarlo, quitar el enchufe y consultar con el vendedor autorizado o con la empresa fabricante para su reparación.



¡Riesgo de descarga, cortocircuito o incendio!

No utilizar el dispositivo si el tejido resultara dañado dejando a la vista los componentes internos del aparato.

¡Riesgo de lesiones. Consultar con el vendedor autorizado o con la empresa fabricante para la reparación.



No permitir que los niños utilicen o jueguen con el aparato.

¡Riesgo de lesiones.

Riesgo de accidentes o lesiones !

No maniobrar los interruptores, utilizar el mando a distancia y/o desconectar el enchufe con las manos mojadas.

Riesgo de descargas o lesiones !

No desmontar ni modificar el dispositivo.

Riesgo de incendio o lesiones debidas a un funcionamiento anómalo.



2. PRECAUCIONES DE USO (ESTRUCTURA/SILLÓN)

2.2 Precauciones utilización del mecanismo



- No sustituir el enchufe bajo ningún concepto.
- En caso de utilización del respaldo reclinable o del reposapiés, asegurarse de que no haya en la vecindad objetos y/o personas que podrían resultar dañados.
¡Riesgo de lesiones.
- Evitar sentarse violentamente sobre el mecanismo.
¡Riesgo de lesiones.
- En caso de contacto del revestimiento externo con detergentes (en particular que contengan sulfuros), champús u otras sustancias, limpiar inmediatamente con un paño ligeramente humedecido en una solución de agua y jabón neutro y luego secar con un paño seco.
¡Puede causar alteraciones del color o manchas.
- Está prohibido que los niños jueguen con la estructura/sillón
¡Riesgo de lesiones.
- Está prohibido el uso del sillón por parte de niños o personas discapacitadas sin supervisión.
¡Riesgo de lesiones.

2.3 Precauciones eléctricas

- Introducir el enchufe de alimentación hasta al fondo en la toma de corriente.
¡Riesgo de cortocircuito o incendio.
- Cuando el dispositivo no se utilice, comprobar que el interruptor general esté apagado, el interruptor de seguridad desactivado, el enchufe desconectado y que el mando a distancia esté correctamente colocado en el departamento correspondiente si lo tuviera.
¡Riesgo de incendio, descargas, cortocircuito y accidentes con el cable por parte de los niños.
- Al desconectar el enchufe de la toma de corriente no tirar nunca del cable, sino sujetar directamente el enchufe junto a la toma de corriente.
¡Riesgo de cortocircuito, descargas o incendios causados por la rotura del cable.
- En caso de corte de corriente, desconectar el dispositivo y sacar el enchufe de la toma de corriente.
¡Riesgo de accidentes.

2. PRECAUCIONES DE USO DEL SILLÓN

¡ATENCIÓN!

2.4 Consejos para el usuario final del producto para evitar riesgos de averías, daños y/o lesiones



- No utilizarlo cuando se lleven prendas mojadas.
- ¡ Riesgo de lesiones o descargas.
- No utilizarlo cuando el sillón esté mojado.
- ¡ Riesgo de lesiones o descargas.
- No utilizarlo con una tensión diferente a la indicada en la etiqueta ni introducir el enchufe en una toma múltiple.
- ¡ Riesgo de incendio o cortocircuito.
- No utilizarlo en un ambiente con un alto porcentaje de humedad como el cuarto de baño ni en el exterior.
- ¡ Riesgo de incendio o cortocircuito.
- No sentarse, subirse o saltar sobre el respaldo, sobre los brazos o el reposapiés.
- ¡ Riesgo de lesiones o daños en el aparato.
- No introducir manos o pies bajo el sillón, en los huecos entre el respaldo y el asiento o el reposabrazos.
- ¡ Riesgo de lesiones.
- No utilizarlo en caso de daños en el cable eléctrico, en el enchufe o en la toma de corriente.
- ¡ Riesgo de descarga, cortocircuito e incendio.
- No dañar, romper, modificar, plegar, estirar, torcer, enrollar el cable eléctrico durante el uso.
- ¡ Riesgo de descarga, cortocircuito e incendio.
- No apoyar o amontonar objetos pesados sobre el aparato.
- ¡ Riesgo de descarga, cortocircuito e incendio.
- No dañar el enchufe con alfileres, agua o suciedad.
- ¡ Riesgo de incendio, descarga o cortocircuito.
- No colocar el sillón cerca de estufas o de otras fuentes de calor.
- ¡ Riesgo de incendio o averías.
- No colocar el cable de alimentación cerca de un fuente de calor o superficies calientes.
- ¡ Riesgo de incendio, averías o daños a personas.

2. PRECAUCIONES DE USO

¡ATENCIÓN!

No utilizar componentes distintos a los contenidos en el kit.

Utilizarlo solo en un entorno doméstico.

No exponerlo a temperaturas, humedad, y usos diferentes a los indicados en el presente manual.

- No utilizarlo con una tensión y frecuencias diferentes a las indicadas en el presente manual.

No montarlo de manera distinta a la explicada en el presente manual.

No utilizar materiales peligrosos para la salud del usuario final.

Montarlo teniendo cuidado de no generar riesgos debidos a cortes de los cables eléctricos y/o cizallamiento mecánico.

2.5 Advertencias para el posicionamiento

- Elegir un lugar plano que soporte el peso del sillón.

- En caso de colocación sobre suelos no rígidos (alfombras, moqueta) se aconseja utilizar otra alfombra más para evitar que el suelo sufra deformaciones causadas por el peso del sillón.

- Colocarlo en lugares no directamente expuestos al sol para evitar alteraciones en el revestimiento. Protegerlo además de la exposición al sol utilizando cortinas en las ventanas.

- Colocarlo alejado de las fuentes de calor para evitar alteraciones en el revestimiento.



¡ATENCIÓN!

- No utilizarlo en un ambiente con un alto porcentaje de humedad como el cuarto de baño ni donde haya riesgo de que el sillón se moje.


¡Riesgo de incendio o cortocircuito.

2.6 Espacio y precauciones para reclinar el respaldo

- Comprobar que no haya niños ni objetos detrás del sillón. -

Dejar una distancia de más de 65 cm entre el sillón y la pared.

-No pisar el cable eléctrico ni el mando a distancia.

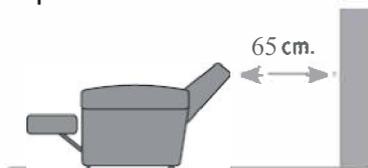

¡ATENCIÓN!

- En caso de utilización del respaldo reclinable o del reposapiés, asegurarse de que no haya alrededor objetos y/o personas que podrían resultar dañados. Riesgo de lesiones.

2. PRECAUCIONES DE USO (ESTRUCTURA/SILLÓN)

2.7 Precauciones sobre el acolchado: Advertencias y riesgos

- Al mover el sillón, enrollar el cable y tener cuidado de no pisarlo. Tener cuidado también con los choques que podrían dañar el sillón.
 - Tener cuidado al mover el sillón sobre suelos delicados. Las ruedas (si las hay) podrían provocar daños.
 - No mover el sillón con objetos o personas encima. También puede dañarse el suelo a causa del peso.
 - Al colocar el sillón asegurarse de que el suelo sea lo suficientemente plano y que soporte el peso.
- ¡ En lugares no planos podría haber riesgo de caídas y lesiones además de daños en el suelo.




1) Desenchufar el cable eléctrico y colocarlo enrollado sobre el asiento.

2.8 Consejos sobre el acolchado:

Sentarse en el sillón en posición cómoda y relajada apoyando bien la espalda. Para utilizar el sillón llevar siempre prendas de vestir.

Ejemplo de utilización:

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| - Respaldo levantado | - Respaldo inclinado | - Chasis elevado |
| - Posición normal | - Posición de relajación | - Posición de incorporación |

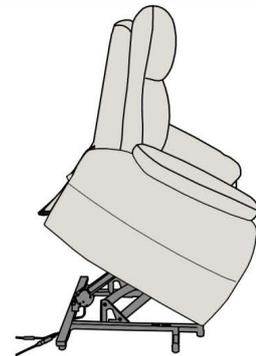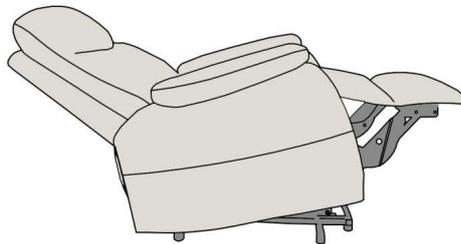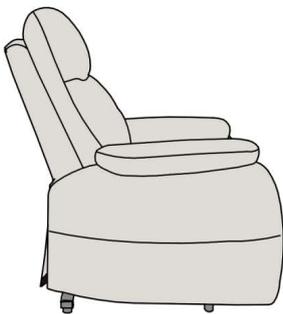

3. Instrucciones de uso del sillón TÍVOLI

3.1 Sistema de 1 motor

El sillón de 1 motor se controla mediante un mando de 2 botones cuyas funciones se describen a continuación:



Al pulsar este botón el **respaldo se baja y el reposapiés se levanta** simultáneamente. Al apretar el botón cuando el sillón está en posición lift (erguido) el sillón vuelve a la posición natural.



Al apretar este botón el **respaldo se levanta y el reposapiés desciende** simultáneamente. Si se mantiene pulsado el botón se devuelve al sillón a la posición lift (erguido).



4. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS (ESTRUCTURA/SILLÓN)

4.1 Mantenimiento

Limpiar con un paño húmedo. En caso de suciedad particularmente resistente utilizar solamente jabón neutro. **No utilizar nunca disolventes, gasolina, gasoil, tricloroetileno o alcohol.**



MÁXIMA ATENCIÓN

- Durante el mantenimiento desconectar siempre el interruptor y sacar siempre el enchufe de la toma de corriente. No efectuar nunca estas operaciones con las manos mojadas.

¡ Riesgo de descargas o lesiones.

- No echar agua sobre el dispositivo.

¡ Riesgo de descargas y daños en el dispositivo.

Advertencias

- Para el mantenimiento del revestimiento (sillón), no utilizar detergentes neutros, blanqueadores, tricloroetileno, gasolina u otros diluyentes.

¡ Riesgo de alteración del revestimiento.

- No utilizar aerosoles abrillantadores, cremas grasas y productos inadecuados.

¡ Riesgo de alteración del revestimiento.

Si no se utiliza el sillón durante un periodo largo de tiempo, guardarlo en un lugar con bajo porcentaje de humedad y de polvo para evitar que el revestimiento se cubra de moho o se oxide el mecanismo de la estructura.

Advertencias

- Para mover el sillón sujetar la parte inferior de los brazos a la derecha y a la izquierda.

¡ Riesgo de pérdida del equilibrio y caída si se agarra por otras partes.

Advertencias

- No guardarlo en lugares expuestos directamente a la luz del sol o cerca de fuentes de calor.

¡ Riesgo de alteración del revestimiento.

- No guardar el producto en un lugar abierto.

¡ Riesgo de daños.

5. DESECHAR EL PRODUCTO

Información a los usuarios

En el marco del art. 13 del D. Leg. 25/07/2005 nº 151 "Aplicación de la Directiva 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, así como a la eliminación de los desechos".

El símbolo del contenedor tachado indicado en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser depositado separadamente de otros desechos.

El usuario final deberá llevar el aparato al final de su vida útil a los centros adecuados de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrotécnicos, o entregarla al vendedor en el momento de la compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, en razón de uno por uno.



La recogida diferenciada para el envío posterior del aparato desechado al reciclaje, tratamiento o eliminación adecuada contribuyen a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El vertido inadecuado del producto por parte del usuario comporta la aplicación de sanciones administrativas según el D. Lgs nº 152 del 3 de abril de 2006.

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES SILLON TÍVOLI



¡ATENCIÓN!

Cualquier operación de mantenimiento debe ser realizada por personal cualificado o en los centros de asistencia autorizados.

Realizar todas las operaciones de mantenimiento y/o reparación utilizando herramientas adecuadas evitando dañar los cables.

No realizar conexiones de manera diferente a la indicada en el presente manual. No conectar a la unidad de control dispositivos con características eléctricas y mecánicas diferentes de las indicadas en el presente manual.

No conectar el cable de alimentación a tomas con tensiones diferentes de las indicadas en el presente manual.

No mojar los componentes del kit.

El aparato debe estar desconectado de la red antes de realizar reparaciones y operaciones de desmontaje o cualquier operación que ponga al eventual operador en contacto con piezas sometidas a tensión (el enchufe el dispositivo de seccionamiento).

No exponer el panel de control a la luz solar directa.

7. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Condiciones de almacenamiento y de uso

Entorno de funcionamiento: Temperatura: de 0°C a 40°C

Humedad: de 20 a 70% (sin condensación)

Entorno de almacenamiento: Temperatura: de 0°C a 40°C

Humedad: de 10 a 70% (sin condensación)

1 motor



8. DUDAS Y SOLUCIONES EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO

A] Problema; B] Comprobación; C] Solución

- A] El apagado del sillón después de un uso prolongado,
- B] puede deberse a la intervención de un limitador térmico de disparo automático.
- C] Sacar el enchufe y esperar algunas horas.

Si se verifican otros casos aparte de los indicados, desconectar el enchufe de la toma de corriente, esperar un poco, volver a enchufar y poner en marcha el aparato. Recién comprado, el aparato puede emanar un olor extraño, pero se trata del olor de su revestimiento. Si el aparato continuara teniendo problemas, dirigirse a un vendedor autorizado o a la empresa fabricante. En este caso suministrar el nombre del producto, modelo, fecha de compra y causas de la avería.

Garantía

En el caso de una reclamación **el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.**

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien; para cualquier duda o reclamación, puede enviarnos un e-mail a incidencias@wellell.com o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que WELLELL entrega el producto al cliente.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar del cliente donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto, es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

WELLELL declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligroso de esta silla, por su falta de mantenimiento o por no seguir las indicaciones del manual de uso.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a WELLELL.

El fabricante se reserva el derecho a modificar dicho documento sin previo aviso.



ZHEJLANG RUIHAO FURNITURE CO.,LTD
Fantan Industrial Zone,Dipu Town,Anji County,
Zhejiang 313300,China



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.



Importador y Distribuidor

WELLELL IBERIA S.L.U
C/ Elcano 9, 48008, Bilbao, Vizcaya
Tlf: 944.70.64.08

Wellell