

Sedens Series

Superficie Especial de Manejo de Presión Híbrida y Dinámica



La gama Sedens integra todos los cojines Wellev para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión (UPP's) siguiendo las últimas recomendaciones de la EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Los Sedens 400 y 500 incluyen diferentes tecnologías dinámicas, adaptadas a los diferentes pacientes según su peso, el grado de úlcera y los niveles de riesgo.

Wellev

Sedens 400



El Sedens 400 destaca por su tecnología híbrida que ofrece una doble función a los usuarios.



Por un lado, proporciona una prevención para riesgo alto y un tratamiento de las úlceras por presión de grado III en la zona del sacro en personas con movilidad reducida. Su uso combinado con el compresor del colchón (Domus 2+, 3 y 4) proporciona una terapia de presión alternante al paciente. Además, incluye un Kit adaptador para poder utilizarlo con el compresor de Domus 1, S y 2.



Por otro lado, permite utilizarlo como cojín de posicionamiento para sillas de ruedas. Su válvula Smart permite un ajuste perfecto de presión.

Incorpora una funda bi-elástica que reduce la fricción. Es resistente al agua, retardante al fuego y fácil de lavar.



Compuesto de seis celdas de foam dentro de cada una de ellas, que combinado con el compresor del colchón, proporciona una terapia de presión alternante.



Su válvula Smart permite ajustar la presión para un correcto posicionamiento en sillas de ruedas.

Sedens 500



El Sedens 500 resulta ideal para la prevención (riesgo muy alto) y el tratamiento de las úlceras por presión de grado III y IV en la zona del sacro en personas con movilidad reducida. Disponible en tres medidas: 43 x 43 cm, 41 x 42 cm y 46 x 46 cm.

Está compuesto de cuatro celdas de aire de presión alternante sobre una base de espuma. La alternancia se obtiene mediante un compresor compacto y autónomo (dispone de una batería con hasta 12 horas de duración). El compresor cuenta con un menú en el que se puede fijar: el modo (alternante o estático), la duración del ciclo (10, 15 ó 20 min), el confort del paciente (de 1 a 5) y dos alarmas silenciables (baja presión y batería baja).

Incorpora una funda bi-elástica que reduce la fricción. Es resistente al agua y fácil de lavar.



Compuesto de cuatro celdas de aire de presión alternante sobre una base.



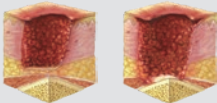
Batería de litio de larga duración que permite utilizarlo con una autonomía de hasta 12 horas.



Compresor compacto, de fácil uso y silencioso.



Funda PU bi-elástica, transpirable e impermeable al agua.

Eficacia Terapéutica	Sedens 400 y 500
Alivio de Presión	Medio / Alto
Gestión del Microclima	Muy alta
Reducción de la Fricción	Alta
Riesgo de Úlceras	Alto y Muy Alto
Tratamiento UPP	Grado 3 y 4 
Peso máximo del paciente	120 - 150 kg

Descripción de Producto	Sedens 400	Sedens 500 43 x 43	Sedens 500 41 x 42	Sedens 500 46 x 46
Referencia	0101024W	0101021W	0101021-41W	0101021-46W
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	48 x 47 x 47 cm	46 x 44 x 13,5 cm	52,1 x 49,7 x 51,5 cm	52,1 x 49,7 x 51,5 cm
Peso total de la caja	6,5 kg	3,5 kg	3,5 Kg	3,7 Kg

Especificaciones de producto	Sedens 400	Sedens 500 43 x 43	Sedens 500 41 x 42	Sedens 500 46 x 46
Dimensiones (largo x ancho x alto)	Cojín: 44 x 41 x 9 cm	Cojín: 43 x 43 x 10 cm	Cojín: 41 x 42 x 10 cm	Cojín: 46 x 46 x 10 cm
		Compresor: 25 x 12,5 x 5,7 cm	Compresor: 25 x 12,5 x 5,7 cm	Compresor: 25 x 12,5 x 5,7 cm
Peso del producto	Cojín: 1,11 kg	Cojín: 1,44 kg	Cojín: 2 kg	Cojín: 2,2 kg
		Compresor: 960 gr	Compresor: 960 gr	Compresor: 960 gr
Material del cojín	Nylon PU	Nylon PU	Nylon PU	Nylon PU
Material de la funda	Nylon PU bi-elástica	Nylon PU bi-elástica	Nylon PU bi-elástica	Nylon PU bi-elástica
Voltaje		AC 100V-240V, 50/60 Hz DC 12V, 1,25A con adaptador	AC 100V-240V, 50/60 Hz DC 12V, 1,25A con adaptador	AC 100V-240V, 50/60 Hz DC 12V, 1,25A con adaptador
Máxima salida de aire		1,8 l/min	1,8 l/min	1,8 l/min
Niveles de confort		5	5	5
Ciclo temporal		10, 15 o 20 min	10, 15 o 20 min	10, 15 o 20 min
Terapia	Alternante y Posicionamiento	Alternante	Alternante	Alternante
Funciones		Estática, botón de encendido y apagado	Estática, botón de encendido y apagado	Estática, botón de encendido y apagado
Peso máximo soportado	150 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Certificado	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2
Garantía	2 años	2 años. Batería 6 meses	2 años. Batería 6 meses	2 años. Batería 6 meses

Wellell Iberia S.L.
 Elcano 9, 6ª planta
 48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
 T +34 94 4706408
 info@wellell.com



Wellell