

VariLymph Pro

Presoterapia profesional de 12 cámaras



Wellell

VariLymph Pro



El uso de la Compresión Neumática Intermitente (IPC, en inglés) es una terapia para el tratamiento de las afecciones linfáticas y circulatorias, cómoda y sin efectos secundarios. Consta de un compresor que insufla aire en las cámaras que cubren las extremidades. La presión y la duración de la terapia se pueden ajustar exactamente a las necesidades e indicaciones del paciente.


Las indicaciones de la IPC son, según la Sociedad Alemana de Flebología:

- Profilaxis tromboembólica
- Ulcus cruris (úlceras)
- Edema post-traumático
- Lipoedema
- Edema venoso
- Edema linfático
- Formas mixtas de edema
- Oclusión arterial periférica
- Síndrome post-trombótico
- Afecciones sensoriales causadas por la hemiplejía, bajo estricta supervisión médica


Funcionamiento

1. Ajuste óptimo de la funda con extensor.

- Debe ajustarse a la circunferencia de la pierna y el brazo.
- Debe ser suficientemente larga.
- Para el tratamiento del linfedema y del lipoedema, la pelvis debe quedar completamente cubierta.

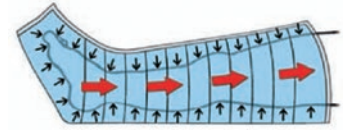

Manguito Pierna

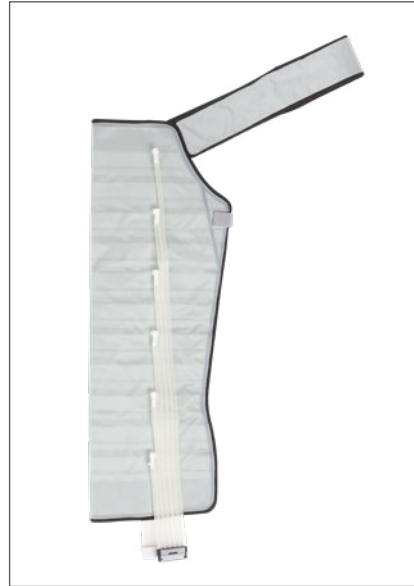


Manguito Brazo y Hombro



Manguito Pantalón

2. Las cámaras vacías de la funda se llenan sucesivamente con aire por etapas.
3. La duración del llenado depende de la anatomía del paciente y del tiempo que se haya seleccionado. Este proceso transporta el fluido de los tejidos con el fin de reducir el edema.
4. La presión, que debe ser configurada por un profesional clínico, se ajusta exactamente a las necesidades del paciente.
5. Cuando se llenan todas las cámaras, la funda queda inflada durante el tiempo establecido para la terapia. Después de una breve parada, el ciclo vuelve a comenzar. Durante la pausa con la terapia, la sangre oxigenada fluye de nuevo al tejido.

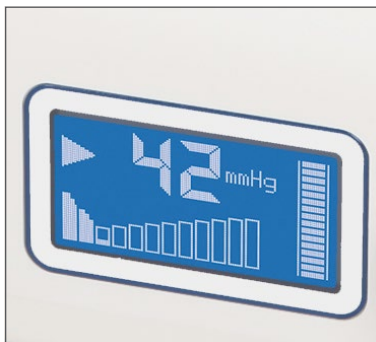

Compresor con pantalla informativa y posibilidad de conectar hasta 2 tubos



Fundas de Calidad Premium



Conector seguro a prueba de torsión

Descripción de producto	Referencia
Compresor	0426001
Manguito Brazo y Hombro - Largo 76 cm	0426005
Manguito Pantalón Corto - Largo 108 cm	0426007 (Bajo pedido)
Manguito Pantalón Normal - Largo 118 cm	0426006
Manguito Pierna Corta - Largo 72 cm	0426003
Manguito Pierna Normal - Largo 81 cm	0426002
Descripción de accesorios	
Manguito Pantalón Corto - Extensión	0426011 (Bajo pedido)
Manguito Pantalón Normal - Extensión	0426010 (Bajo pedido)
Manguito Pierna Corta - Extensión	0426009 (Bajo pedido)
Manguito Pierna Normal - Extensión	0426008 (Bajo pedido)

Especificaciones del compresor	
Dimensiones y peso	17 x 20 x 20 cm (largo x ancho x alto) 2 kg
Potencia	230 V, 50 Hz
Presión	15 – 80 mmHg
Salida de aire	17 litros/min
Duración del ciclo	10 / 60 min
Vías de entrada/salida	12
Material	ABS - Polylac® PA-765
Garantía	2 años

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	Referencia
95 x 60 x 41 cm. 1,3 kg (Caja de 5 uni)	0426001
80 x 37 x 37 cm. 4,4 Kg (Caja de 8 uni)	0426002/0426003/0426004/0426005/0426006/0426007/ 0426008/0426009/0426010/0426011

Especificaciones de los manguitos	Manguito Brazo y Hombro Largo 76 cm	Manguito Pantalón Corto Largo 108 cm	Manguito Pantalón Normal Largo 118 cm	Manguito Pierna Corta Largo 72 cm	Manguito Pierna Normal Largo 81 cm
Dimensiones (cm) y peso	84 x 52 x 66 x 52 (largo x hombro x codo x mano) 450 gr	108 x 76 x 70 x 63 (largo x parte sup. x parte media x parte inf.) 530 gr	118 x 76 x 70 x 63 (largo x parte sup. x parte media x parte inf.) 550 gr	72 x 73 x 56 x 53 (largo x parte sup. x parte media x parte inf.) 450 gr	81 x 78 x 57 x 53 (largo x parte sup. x parte media x parte inf.) 500 gr
Vías de entrada/salida	12	12 x 2	12 x 2	12	12
Material	Interior: Nylon 210D laminado con 0,15mm TPU Exterior: Nylon 210D laminado con 0,10mm TPU				
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

Especificaciones de los extensores	Manguito Pantalón Corto - Extensión	Manguito Pantalón Normal - Extensión	Manguito Pierna Corta - Extensión	Manguito Pierna Normal - Extensión
Dimensiones (cm) y peso	1 tobillo 13 Empeine 10 300 gr	20 x 10 (parte sup. x parte inf.) 300 gr	20 x 10 (parte sup. x parte inf.) 300 gr	20 x 10 (parte sup. x parte inf.) 300 gr
Vías de entrada/salida	12	12 x 2	12 x 2	12
Material	Interior: Nylon 210D laminado con 0,15mm TPU Exterior: Nylon 210D laminado con 0,10mm TPU			
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

Wellell Iberia S.L.
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell

