

*Fácil uso para su independencia*

kingon

Qingdao Kingon Medical Science and Technology Co., Ltd  
Manufacturer Address :Room 301-302, No. 15 Hancheng Road ,  
Qingdao Free Trade Zone, Shandong , China , 266555  
Factory Address:24 th Factory Building, NO. 252 Yanhe Road,  
Huangdao, Qingdao, Shandong, China, 266510

Tel: +86 532 58792324

E-mail: kingonmed@gmail.com

www.kingonmed.com

kingon

Kingon

P2

Guía  
Rápida

No.: DO-P2-08 Version No.: A/0



kingon P2


Tiene todo lo que necesita para empezar a usar el POC.

Esto es una guía de montaje rápido, pero por favor, lea el manual de uso completo antes de empezar a usarlo.





**1** Coloque el POC en un lugar con ventilación. Asegúrese de que las salidas de aire no queden cubiertas.

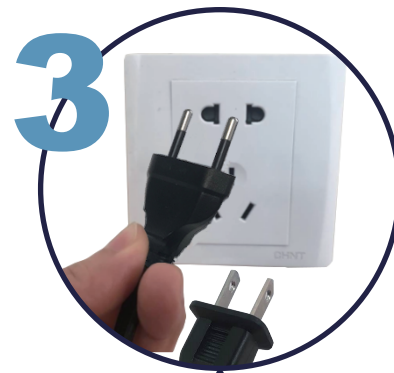

**3** Enchufe el POC a la corriente.



**5** Presione el botón On/ Off durante un segundo. Oirá un bip y las luces se encenderán en posición On. El dispositivo comenzará a calentarse y dos minutos después se iniciará.



**7** Con los indicadores (+/-) cambie la presión de la salida de aire al nivel prescrito por su médico.



**2** Coloque la batería en el POC presionando suavemente hasta que oiga un clic.



**4** Conecte el cable al POC. A continuación, se encenderá un LED de color verde y oirá un bip.



**6** Coloque la cánula en el conector. Asegúrese de que está recta para que el oxígeno fluya correctamente.



**8** Para apagar el POC tiene que presionar durante 3 segundos el botón On/ Off.

**Información Adicional**  
Cuando el adaptador y la batería se conectan o desconectan, se oirán unos bips. Si observa la pantalla cuando esto sucede, podrá ver la información relativa a la conexión.