

# Grúa Hércules

Manual de Uso



V6-19/12/2024

La Grúa Hércules es un producto innovador diseñado para proporcionar ayuda a la hora de cargar con las scooters para subirlas a los vehículos o lugares altos.


Su estructura resistente y ligera (10 Kg) permite una fácil manipulación y casi no ocupa espacio para poder almacenarla (70 x 40 x 23 cm).

Funciona con un pequeño motor y un bastidor principal tipo escalera telescópica.

Soporta hasta 45 Kg de peso.

## ESTRUCTURA DEL HÉRCULES

- Fácil de plegar y desplegar
- Dimensiones plegada 70 x 40 x 23 cm
- Dimensiones desplegada 178 x 85 x 70 cm

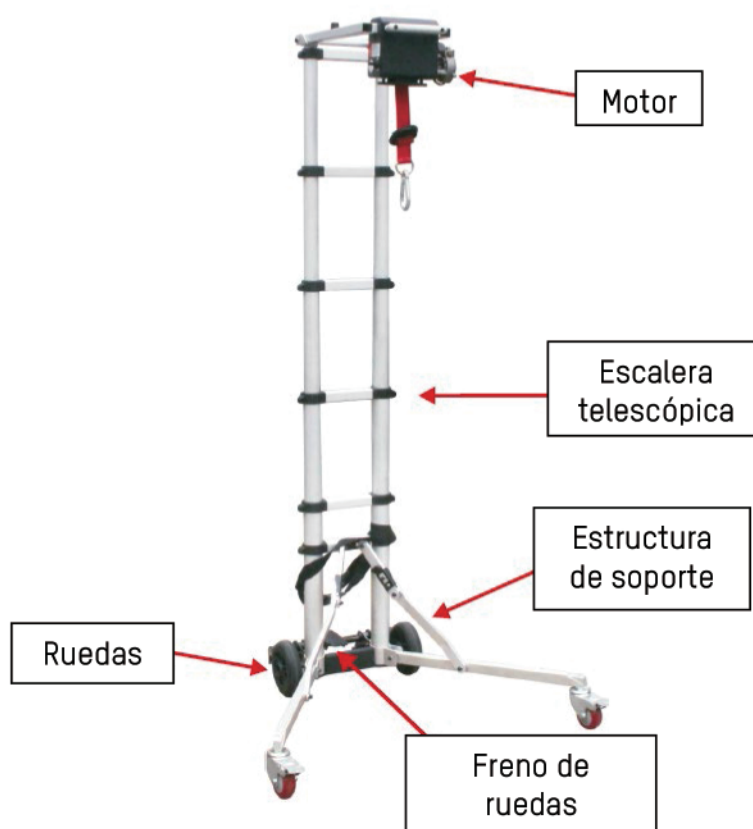

## ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

ARTÍCULO / MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE ELEVACIÓN	PESO NETO	MOTOR
Grúa Hércules	45 KG	1,5 M	13,5 KG	DC 24V

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Para desplegar la grúa suelte la correa. A continuación despliegue la estructura de soporte para que las ruedas puedan apoyarse horizontalmente.



### NOTA:

Asegúrese de que el suelo está liso y sin ningún obstáculo. Verifique que la estructura de soporte está en la posición correcta para que mantenga la grúa en pie.

2. Tire de la agarradera gris situada en el motor y levántela hasta que quede horizontal.



3. Vaya tirando de la estructura de la grúa por secciones asegurándose de oír un click en cada tramo para comprobar que la estructura está fija. Los botones rojos que hay en cada sección deben de estar alineados hacia afuera.



**NOTA:**

Asegúrese de que la grúa está extendida del todo.  
Verifique que los botones rojos están hacia afuera.

4. Identifique la altura y peso del objeto a levantar antes de usar la grúa Hércules.

**NOTA:**

No sobrecargue el Hércules ya que puede producir daños en el motor y reducir los años de vida útil.

5. Para fijar la grúa y evitar que se mueva, presione con el pie el freno situado en la parte de abajo. Para soltar el freno presione con el pie hacia arriba.



6. Asegúrese de sujetar correctamente la scooter con el gancho de la correa roja, ya que podría caerse.

### 7. Conexión de electricidad:

Enchufe el cable de alimentación en el motor del Hércules.



### 8. Interruptor de control:

Levante la scooter presionando el botón hacia arriba, para bajarla, pulse el botón hacia abajo.



### 9. Plegar la grúa

Para plegarla solo tiene que presionar los botones rojos hacia adentro y empujar hacia abajo la sección de la grúa. Tiene que ir presionando cada sección de la grúa de una en una para garantizar su correcto cierre.



Apriete los botones rojos hacia adentro.

**NOTA:**

No ponga los dedos entre los pedales o sobre el bastidor mientras dobla el Hércules.

Asegurese de que el botón esté en la posición correcta y que no doble los tubos con demasiada fuerza.

A continuación pliegue la parte del motor hacia atrás.



Para cerrar el soporte tiene que tirar de las pestañas negras (ubicadas en la parte en la que se pliega la grúa) y tirar de la barra hacia arriba.

Coloque la correa y ajústela para que la grúa quede perfectamente cerrada.



Cualquier incidente grave relacionado con este producto deberá ser comunicado inmediatamente a su proveedor.

# Garantía

En el caso de una reclamación **el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.**

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien; para cualquier duda o reclamación, puede enviarnos un e-mail a [incidencias@wellell.com](mailto:incidencias@wellell.com) o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que WELLELL entrega el producto al cliente.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar del cliente donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto, es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

WELLELL declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligroso de esta silla, por su falta de mantenimiento o por no seguir las indicaciones del manual de uso.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a WELLELL.



# Be well, Live well

# Wellell



**Dongguan Prestige Sporting Goods Co., Ltd.**  
3<sup>rd</sup> Industrial, Qiaotou Area, Houjie Town,  
Dongguan City, Guangdong Province, China.



Wellell Iberia S.L.  
Elcano 9, 6<sup>a</sup> planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain



Wellell Iberia S.L.  
Elcano 9, 6<sup>a</sup> planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain







Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro  
Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf



Respete las normas de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Este producto debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió este producto.



## Condiciones y cuidado para el uso de su silla y joystick

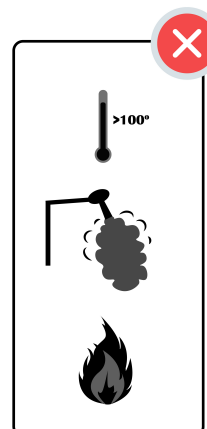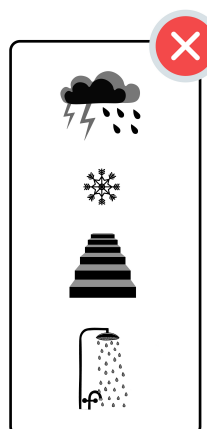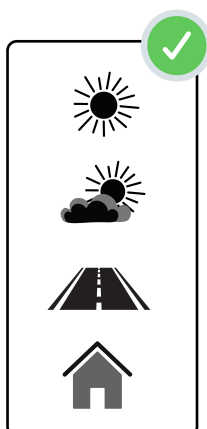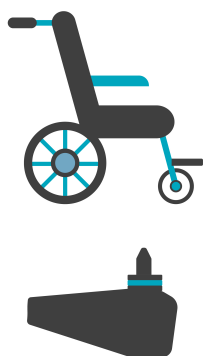



## INFORMACIÓN SOBRE BATERÍAS

Si desea viajar en avión, por favor consulte la normativa al respecto a través del siguiente enlace:



Por favor contacte con Wellell Iberia si necesita más información.

**Wellell**

Wellell Iberia SL  
Elcano, 9 - 6º.  
48008 Bilbao (Bizkaia) SPAIN  
Tel: (+34) 94.470.64.08 Fax:  
(+34) 94.470.64.09  
[info@wellell.com](mailto:info@wellell.com)  
<http://www.wellell.com>

## ¿Qué cuidados necesitan las **baterías**?

Buenas prácticas para la **conservación** de las baterías

### Primera carga



Antes de su primer uso, carga la batería **POR COMPLETO**.

Ten en cuenta que la batería adopta su capacidad máxima tras cargarse aproximadamente 10-15 veces por completo.

### Mantenimiento



Carga la batería por completo **SIEMPRE** tras su uso.



Evita que el nivel de batería descienda por debajo de 2 led o 20% de capacidad.

Una descarga completa provoca daños irreversibles. Además, hacerlo de forma continuada, merma la capacidad de la batería y reduce su vida útil.

### Almacenamiento

Si **NO** utilizas el equipo:

< 1  
mes



A lo largo de un mes, realiza al menos una carga completa cada 15 días.

> 1  
mes



Durante más de un mes, realiza una carga completa cada 15 días y retira la batería del equipo.

**Wellell**

✉ info@wellell.com

👤 944.70.64.08

