

Brio Plus

Scooter plegable

Manual de Uso



V18-03/04/2025

Índice

Información	P1
Instrucciones de seguridad	P3
Interferencia Electromagnética	P9
Especificaciones técnicas	P11
Ajustes	P12
Funcionamiento del Panel de Control	P14
Freno y conexión de la batería.....	P17
Batería e instrucciones de carga.....	P18
Señales indicadoras.....	P21
Mantenimiento y reparaciones	P24
Listado de materiales	P25
Declaración de garantía.....	P26
Garantías.....	P27

Scooter con motor eléctrico Clase A (EN 12184)



Los usuarios deben consultar estas instrucciones para saber cómo utilizar el scooter correctamente.

Desplazamiento de personas adultas con movilidad reducida mediante conducción autónoma. Peso máximo del usuario: 115 kg. Scooter eléctrico clasificado en la Clase A (EN12184). Pendiente máxima segura: < 100 kg hasta 5° / > 100 kg hasta 3°.

Este producto no puede ser conducido por personas con problemas de visión. Los conductores deben estar mental y físicamente capacitados para conducir este scooter. Los dedos deben tener una correcta movilidad. Las personas menores de 12 años no pueden conducir este scooter. La autonomía del scooter se reducirá si se utiliza con frecuencia en pendientes, terrenos irregulares o para subir bordillos. No se puede utilizar como asiento en un vehículo de motor.



ATENCIÓN

Tanto el conductor como la persona que le asista podrán realizar todos los ajustes necesarios. Vehículo apto para ser transportado por tierra y/o aire. Consulte nuestro sitio oficial para obtener información general sobre el producto en <https://www.wellell.com/sp/index.html>

Bajo ningún concepto suba una pendiente mayor que el ángulo máximo de subida < 100 kg hasta 6° / > 100 kg hasta 3°, con este scooter eléctrico. Cualquier intento de subir una pendiente superior a lo mencionado anteriormente puede hacer que el scooter pierda movilidad y vuelque. Cuando se encuentre en cualquier tipo de pendiente ascendente o descendente, nunca ponga el scooter en modo de rodada libre. ¡ÁNGULO MÁXIMO DE SUBIDA: < 100 kg hasta 6° / > 100 kg hasta 3°!

El cinturón de seguridad se considera un accesorio opcional del scooter eléctrico S19, que se puede instalar en el asiento (véase imagen a continuación). Consulte al distribuidor local autorizado cómo instalar el cinturón de seguridad de forma segura.

Este scooter eléctrico (S19) se podrá detener repentinamente en cualquier momento durante su funcionamiento.

¡No utilice su scooter eléctrico sin haber leído y comprendido completamente este manual de usuario! No utilice el scooter con las baterías agotadas, ya que podría detenerse en mitad de un trayecto. ⇒ El usuario final NO puede cambiar los parámetros de la programación.

El conductor puede apagar y detener el scooter en caso de parada de emergencia. Por favor, retire la caja de baterías del scooter antes de guardarlo durante un espacio de tiempo prolongado.

****Se comunica al usuario y/o al paciente que cualquier incidente grave ocurrido en relación con el scooter se deberá comunicar a Wellell Iberia.**

Deberá apagar el S19 antes de sentarse o incorporarse del asiento.

Asegúrese de que el scooter esté completamente desplegado antes de conducirlo.

Las condiciones ambientales pueden afectar a la seguridad y al rendimiento del su scooter eléctrico. El agua y las temperaturas extremas constituyen los principales elementos susceptibles de causar daños y afectar a su rendimiento.

A) Lluvia, aguanieve y nieve:

La exposición del scooter al agua podría dañar los componentes electrónicos o mecánicos.

El agua puede causar el mal funcionamiento electrónico del scooter o favorecer la corrosión anticipada de los componentes eléctricos y del chasis.

B) Temperatura:

Puede ocurrir que oscile la temperatura de algunas de las piezas del scooter eléctrico.

El regulador solo puede funcionar a una temperatura comprendida entre -20°C y +45°C.

A temperaturas extremadamente bajas, las baterías se pueden congelar y el scooter eléctrico podría no funcionar.

A temperaturas extremadamente altas, el scooter podría funcionar a velocidades más lentas debido a la función de seguridad del regulador, evitando así que se dañe el motor y otros componentes eléctricos.

ICONOS DE SEGURIDAD

Los siguientes iconos se utilizan en el scooter para identificar avisos, normas de uso y acciones prohibidas. Es muy importante que los lea y entienda completamente.



Lea y siga la información contenida en el manual de instrucciones.




Atención. Lea atentamente las notas y la documentación complementaria.

**Scooter
Clase A**

Está clasificado en la Clase A según la EN 12184. Es compacto, maniobrable y no necesariamente apto para superar obstáculos en el exterior.



Condiciones ambientales

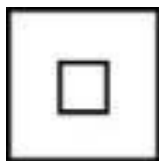

Protección clase II



Cargador IPX0 "Se debe proteger de la humedad" / Scooter IPX4 "A prueba de salpicaduras"



No cumple la norma ISO 7176-19 y no se puede utilizar como asiento dentro de un vehículo de motor. Producto con etiqueta.



Posibilidad de desactivar el sistema de conducción.

Atención: Active de nuevo el sistema de conducción antes de dejar solo al usuario.

ICONOS DE SEGURIDAD



Cargue las baterías completamente antes de usar el scooter. Retire la llave del scooter cuando lo deje desatendido.




Año de fabricación: consulte la etiqueta del producto.



Heartway Medical Products Co., Ltd.

No. 6, Gongyequ 25th Rd., Baoshan Vil., Nantun Dist.

Taichung City 408017, Taiwan (R.O.C.)

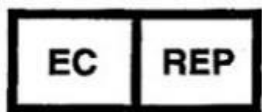

Europäischer Bevollmächtigter / Authorized Representative

Emergo Europe / Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem The Netherlands



IMPORTADOR: WELLELL IBERIA S.L.

c/ Elcano, 9, 6ª planta, 48008 Bilbao (Vizcaya)

Tel: (+34) 94.470.64.08

El scooter S19 ha sido fabricado para su uso en espacios interiores y exteriores por adultos con limitaciones de movilidad. Está clasificado en la categoría A según la EN 12184. Es compacto, maniobrable y no necesariamente apto para superar obstáculos en el exterior. La carga máxima es de 115 kg.

INDICACIONES

Dirigido a personas con incapacidad para caminar o discapacidad motriz grave debido a:

- parálisis
- pérdida de extremidades
- problemas en las articulaciones (no en ambos brazos)
- otras enfermedades

El uso de un scooter (o una silla de ruedas eléctrica) está indicado cuando el uso de la silla de ruedas manual deje de resultar viable debido a la discapacidad del usuario, pero la conducción correcta de un vehículo a motor eléctrico continúe siendo factible.

CONTRAINDICACIONES

No se recomienda el uso de scooters a personas:

- con problemas graves de equilibrio
- con visión reducida e insuficiente
- con problemas cognitivos graves

CONFORMIDAD

El scooter S19 cumple los requisitos de la norma EN 12184: 2014 y los requisitos aplicables a los productos sanitarios conforme a la Clase I del Reglamento (UE) MDR 2017/745.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

General



Utilice siempre el cinturón de seguridad y mantenga los pies en el scooter en todo momento.



No conduzca el scooter en medio del tráfico.



No intente subir bordillos cuya altura sea superior a la indicada en las Especificaciones Técnicas.



Al conducir, no suelte las manos ni saque las piernas del scooter.



Al maniobrar el scooter, asegúrese de que no haya obstáculos detrás.



Al conducir el scooter, no realice giros bruscos y evite frenar bruscamente.



Con el fin de evitar accidentes en suelos resbaladizos, no conduzca el scooter si nieva.



No permita que niños no vigilados por un adulto jueguen cerca del scooter mientras se esté cargando la batería.

ATENCIÓN

No ponga en marcha el scooter por primera vez sin haber leído y comprendido completamente este manual de instrucciones.

1. No utilice el scooter en vías públicas ni carreteras. Tenga en cuenta que puede resultar difícil que los conductores le vean mientras va sentado en el scooter. Obedezca todas las normas de tráfico locales para peatones. Espere hasta que su camino esté despejado y entonces proceda con máxima precaución.
2. Con el fin de evitar que usted o terceros puedan sufrir posibles lesiones, asegúrese siempre de que el scooter esté apagado al subir o bajar de él.
3. Antes de conducir, compruebe siempre que las ruedas de tracción funcionan (modo conducción). No apague el scooter mientras continúe avanzando ya que podría detenerse de forma extremadamente brusca.
4. No utilice este producto ni ningún equipo opcional disponible sin antes haber leído y comprendido completamente estas instrucciones. En caso de no entender los avisos, las advertencias o las instrucciones, póngase en contacto con un profesional sanitario, con el proveedor o con el departamento de asistencia técnica antes de intentar utilizar este equipo. De lo contrario, podrían producirse daños o lesiones.
5. Existen determinadas situaciones, incluidas afecciones médicas específicas, en las que el usuario del scooter deberá practicar con él en presencia de un asistente debidamente facultado. Dicho asistente podrá ser un miembro de la familia o un profesional sanitario específicamente formado para asistir al usuario del scooter en las diferentes actividades cotidianas. En caso de que el usuario esté tomando alguna medicación que pudiera afectar a su capacidad de conducir el scooter con seguridad, deberá ponerse en contacto con su médico.
6. No trate de levantar ni mover un scooter eléctrico tirando de cualquiera de sus piezas extraíbles, incluidos los reposabrazos, el asiento o las cubiertas. Podría sufrir lesiones personales y causar daños al scooter.
7. No trate nunca de utilizar el scooter de una forma que exceda los límites descritos en este manual.
8. No se sienta en el scooter mientras se encuentre dentro de un vehículo en marcha.
9. Al conducir el scooter, mantenga las manos alejadas de las ruedas (neumáticos). Tenga en cuenta que la ropa excesivamente holgada podría engancharse en los neumáticos de tracción.
10. Si está tomando medicación bajo prescripción facultativa o si presenta alguna limitación física, consulte a su médico. Determinados medicamentos y limitaciones podrían afectar a su capacidad para conducir el scooter de manera segura.
11. Tenga en cuenta cuándo está bloqueado o desbloqueado el modo de conducción.
12. No retire el antivuelco si el scooter dispone de este sistema.
13. El contacto con herramientas puede provocar descargas eléctricas. No conecte un alargador al transformador de AC/DC ni al cargador de la batería.
14. No trate de levantar ni mover el scooter tirando de cualquiera de sus piezas extraíbles, como los reposabrazos, el asiento o las cubiertas.
15. Al subir una pendiente, no conduzca de manera transversal a la pendiente. Conduzca el scooter encarando la pendiente de frente. De esta forma se reduce la posibilidad de caídas o vuelcos.
16. No suba pendientes cuyo desnivel exceda los límites establecidos para el scooter.
17. No trate de bajar con el scooter ningún peldaño, bordillo u otro obstáculo marcha atrás. Podría provocar que el scooter volcase.

18. Reduzca siempre la velocidad y mantenga un centro de gravedad estable cuando vaya a tomar una curva de manera brusca. No tome las curvas bruscamente cuando conduzca el scooter a gran velocidad.
19. La conducción del scooter con lluvia, nieve, sal, niebla y sobre superficies heladas o resbaladizas puede ejercer un efecto adverso en el sistema eléctrico.
20. No se siente nunca en el scooter cuando se encuentre en cualquier tipo de ascensor o mecanismo de elevación. El scooter no está diseñado para esta finalidad y cualquier daño o lesión resultante de dicho uso no constituirá responsabilidad de Heartway.
21. Las superficies del scooter eléctrico que puedan entrar en contacto directo con la piel del usuario y/o de su asistente durante su uso normal y que queden al alcance del usuario no superarán los 41°C. La superficie del motor puede alcanzar temperaturas superiores a 41°C tras un periodo de conducción. No toque dichas partes al desmontar el scooter o espere hasta que el motor se haya enfriado.
22. Solo el personal autorizado por el fabricante podrá programar el regulador. ¡Una programación errónea puede implicar riesgos para la seguridad del conductor!
23. Si el scooter eléctrico se apaga mientras circula por una superficie horizontal a una velocidad máxima de 6 km/h, se detendrá con una distancia máxima de frenado de 1 m. Le rogamos que tenga en cuenta esta distancia a la hora de conducir el scooter. 6 KM/H
24. La rueda motriz se debe cambiar al modo conectado cuando el scooter eléctrico se transporte en coche o avión.
25. La temperatura de la superficie puede aumentar debido a la exposición a fuentes externas de calor.
26. El conductor/usuario no se debe sentar en el scooter cuando se encuentre en modo de rodada libre.

MODIFICACIONES

Heartway diseña y fabrica scooters eléctricos destinados a brindar la máxima utilidad a los usuarios. No obstante, con el fin de evitar lesiones personales y daños al scooter, bajo ningún concepto se podrá modificar, añadir, retirar, ni inhabilitar ninguna pieza o función del scooter eléctrico.

Cualquier ajuste o configuración adicional realizados en el scooter sin la autorización del fabricante afectará a su estabilidad de conducción y de funcionamiento.

1. No modifique el scooter eléctrico de ninguna forma no autorizada por Wellell Iberia. No utilice accesorios si no han sido testados o aprobados por Wellell Iberia. Por motivos de seguridad, la modificación de la programación de la centralita solo se realizará por técnicos autorizados.
2. Familiarícese con su scooter eléctrico y sus capacidades. Wellell Iberia recomienda realizar una comprobación de seguridad antes de cada uso para asegurarse de que su conducción sea segura.

◆ Comprobaciones previas a la utilización del scooter eléctrico:

1. En caso de estar equipado con ruedas neumáticas, compruebe que el nivel de inflado de los neumáticos sea correcto.
2. Compruebe todas las conexiones eléctricas y asegúrese de que estén debidamente fijadas y no presenten corrosión.
3. Compruebe todas las conexiones del cableado y asegúrese de que estén debidamente fijadas.
4. Compruebe los frenos.

◆ Límite de peso.

1. Consulte la tabla de especificaciones para obtener información sobre el límite de peso. El scooter eléctrico ofrece una capacidad de peso máxima.
2. Manténgase dentro de la capacidad de peso fijada para su scooter. Si se supera dicho límite, se anulará la garantía.
3. Wellell Iberia no será responsable de las lesiones personales ni de los daños materiales derivados del incumplimiento del límite de peso.
4. No transporte pasajeros en el scooter.
5. El transporte de pasajeros en el scooter puede afectar al centro de gravedad y provocar vuelcos o caídas.

◆ Inflado de neumáticos

1. Si el scooter está equipado con ruedas neumáticas, deberá comprobar la presión del aire como mínimo una vez por semana.
2. Una correcta presión de inflado prolongará la vida de los neumáticos y garantizará el debido funcionamiento del scooter.
3. No infle los neumáticos en exceso ni en defecto. Es muy importante que la presión de los neumáticos se mantenga en todo momento entre 30-35 psi.
4. Si infla los neumáticos con una fuente de aire no regulada, podría hacerlo en exceso y provocar un reventón.
5. Las ruedas de su scooter solo se deben reparar/sustituir por un técnico cualificado.
6. Desinfe completamente los neumáticos antes de desmontar la llanta o intentar realizar una reparación.
7. Asegúrese de retirar la llave del interruptor y de que el scooter no esté en modo de rodada libre antes de realizar este procedimiento de reparación.
8. Al cambiar un neumático, retire solo las tuercas de los tacos y a continuación retire la rueda. Si fuera necesario realizar algún otro desmontaje, desinfe completamente el neumático



◆ Temperatura

1. Algunas partes del scooter eléctrico son susceptibles a los cambios de temperatura. El regulador solo se puede utilizar en un rango de -20°C a $+45^{\circ}\text{C}$.
2. A temperaturas excesivamente bajas la batería puede congelarse y el scooter podría no ponerse en marcha. A temperaturas excesivamente altas el scooter podría ir más lento debido a la función de seguridad del regulador, que impide que el motor y otros componentes eléctricos sufran daños.
3. El scooter se puede utilizar, por lo general, a temperaturas exteriores de entre -10°C a $+45^{\circ}\text{C}$.
4. Algunas partes del scooter se ven afectadas por los cambios de temperatura. El regulador funciona en óptimas condiciones a una temperatura de entre $+25^{\circ}\text{C}$ y 45°C .
5. Por debajo de -15°C las baterías podrían congelarse y el scooter podría no funcionar.
6. A temperaturas extremadamente altas $> 45^{\circ}\text{C}$, la función de seguridad del regulador, que evita que el motor y los demás componentes eléctricos sufran daños, podría causar una reducción de las velocidades máximas.

La rápida evolución de la electrónica, especialmente en el área de las comunicaciones, ha saturado nuestro entorno con ondas de radio electromagnéticas (EM) que son emitidas por señales de comunicación, televisión y radio. Dichas ondas EM son invisibles y su fuerza aumenta según nos aproximamos a la fuente. Todos los conductores eléctricos actúan como antenas frente a las señales IEM y, en diversos grados, todas las sillas de ruedas y scooters eléctricos son sensibles a la interferencia electromagnética (IEM). La interferencia podría provocar un movimiento anormal, involuntario y/o un control errático del vehículo. Los scooters eléctricos pueden ser sensibles a la interferencia electromagnética (IEM), que es la energía electromagnética que interfiere en su funcionamiento, procedente de fuentes tales como emisoras de radio, televisión, transmisores de radioaficionados (HAN), radios bidireccionales, teléfonos móviles y sistemas de alarma en establecimientos comerciales. La interferencia (procedente de fuentes de ondas de radio) puede provocar que se desconecten los frenos del scooter eléctrico, se mueva por sí solo o se pierda el control de la dirección. Asimismo, puede dañar de manera permanente el sistema de control. La intensidad de la energía EM se puede medir en voltios por metro (V/m). Cada scooter eléctrico puede resistir la IEM hasta una determinada intensidad, lo que se denomina “nivel de inmunidad”. Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad, mayor será la protección. En estos momentos, la tecnología actual es capaz de ofrecer como mínimo un nivel de inmunidad de 20 V/ m, lo que supondría una protección muy útil frente a las fuentes comunes de IEM irradiada.

Si se observan las advertencias que se enumeran a continuación, se reducirá la posibilidad de que se produzcan desconexiones de los frenos o movimientos incontrolados del scooter susceptibles de provocar graves lesiones:

1. No encienda dispositivos portátiles de comunicación personal, tales como radios de banda ciudadana (CB, por sus siglas en inglés) ni teléfonos móviles, mientras el scooter eléctrico esté en funcionamiento.
2. Tenga cuidado al circular cerca de transmisores tales como radios o televisores y trate de mantenerse alejado de ellos.
3. Si se produce cualquier movimiento involuntario o se bloquean los frenos, apague el scooter eléctrico tan pronto como sea posible.
4. Tenga en cuenta que, si añade accesorios o componentes, o si modifica el scooter eléctrico, podría hacerlo más sensible a la interferencia de las fuentes de ondas de radio.
(Aviso: resulta difícil evaluar el efecto sobre la inmunidad global del scooter eléctrico).
5. Ponga en conocimiento del fabricante todos los casos de movimientos involuntarios o de bloqueos de los frenos, y observe si existe alguna fuente de ondas de radio en la proximidad.

APAGUE EL SCOOTER ELÉCTRICO TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE SI SE PRODUCE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- Movimientos involuntarios
- Dirección descontrolada o no involuntaria
- Bloqueo imprevisto de los frenos



ATENCIÓN

- El propio scooter puede alterar el funcionamiento de campos electromagnéticos tales como los emitidos por sistemas de alarma de establecimientos comerciales.
- La conducción del scooter se puede ver influida por campos electromagnéticos.

El asiento del scooter S19 ha sido probado según la norma EN1021 en lo que respecta a la resistencia a la ignición. No obstante, se recomienda evitar aproximar artículos con llama al scooter y no fumar mientras se esté sentado en él.

Observaciones:

Las pruebas de estabilidad se han realizado en las posiciones menos estables del asiento (altura y posición delantera/trasera).

La autonomía del scooter se reducirá si se utiliza con frecuencia en pendientes, se realizan giros bruscos o se suben bordillos.



ATENCIÓN

La distancia de frenado en pendiente puede ser significativamente superior que en llano.

Indicaciones/Finalidad prevista:

Desplazamiento de personas con movilidad reducida mediante conducción autónoma.

Este dispositivo médico tiene por objeto proporcionar movilidad a las personas que solo puedan permanecer sentadas, por ejemplo, para su recuperación, especialmente en el caso de personas con movilidad reducida en las piernas.

*Los parámetros de las especificaciones técnicas como la velocidad, autonomía, radio de giro o pendiente están definidas en base a las condiciones óptimas ambientales y de la batería de acuerdo con la ISO 7176

MODELO	S19/S19+
CAPACIDAD DE PESO	115 kg (250 lbs)
ASIENTO: MODELO/TALLA	16"
RUEDA MOTRIZ	Rueda Macizo PU 8" / Rueda neumática 23x6,5cm (9")
RUEDA DELANTERA (RUEDA)	Rueda Macizo PU 7" / Rueda neumática 20x5cm (8")
RUEDA TRASERA (ANTIVUELCO)	SÍ
VELOCIDAD MÁXIMA	6,5 KM/H
ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA	Batería de litio: 25.2V 10.05Ah
TIPO DE CARGADOR	2AMP, 110/240 Volt, Cargador Li-ION
TIPO DE REGULADOR	S-Drive 45 Amp
TIPO DE MOTOR	270 W
PESO: CON BATERÍA	34 KG
PESO: SIN BATERÍA	31 KG
BATERÍA (EXTRAIBLE, LA PIEZA MÁS PESADA)	3 KG
RADIO DE GIRO	900 mm
SUSPENSIÓN	NINGUNA
LONGITUD	960 mm
ANCHURA	530 mm
ALTURA	870-1000mm
Tamaño plegado	860 mm x 460 mm x 550 mm
ANCHURA DEL ASIENTO	400 mm
ALTURA DEL ASIENTO	370 mm
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	310 mm
ALTURA DEL RESPALDO	340 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	720 mm
DISTANCIA AL SUELO	60 mm
PENDIENTE MÁXIMA SEGURA	< 100 kg hasta 6° / > 100 kg hasta 3°
CAPACIDAD OBSTÁCULOS	15 mm

Montar el scooter S19 es muy sencillo. Por favor, siga las instrucciones que se muestran a continuación. El scooter eléctrico S19 cuenta con un cuerpo de aleación de aluminio y se puede plegar fácilmente para que entre en el coche y poderse transportar. Asimismo, los mandos son muy sencillos de utilizar y el manillar es regulable.


Siga los siguientes cuatro pasos para plegar el scooter



Pliegue el respaldo



Ejerza presión suavemente sobre el timón hasta que quede

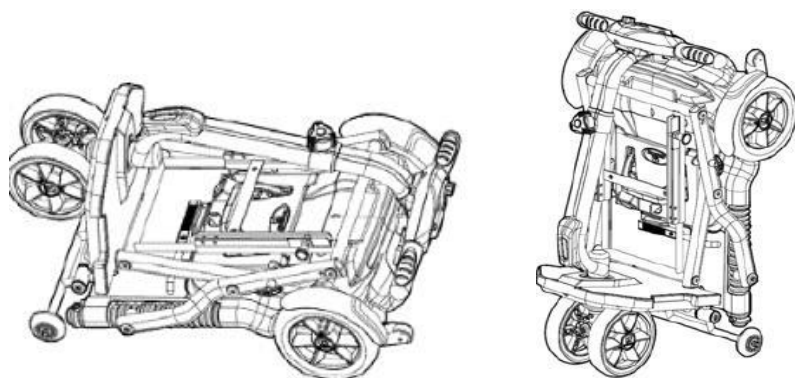

Pise el pedal para soltar el sistema de desbloqueo. Abata el timón para plegar el scooter.

Plegado



Cómo desplegar el Scooter

Apoye el scooter plegado en el suelo sobre la rueda trasera. Tire de la palanca roja situada en el lateral del scooter y comience a desplegarlo desde el timón. Asegúrese de desplegar el timón hasta que las dos ruedas delanteras toquen el suelo y se escuche un clic, indicando que el scooter está bloqueado en posición abierta. Despliegue el respaldo del scooter. Asegúrese de que la palanca de rodada libre esté accionada. Siéntese en el scooter y ajuste la altura deseada asegurándose de que el regulador esté fijo en su posición. Inserte la llave y gírela para accionar el scooter. Empiece a utilizar su scooter y disfrute del viaje.

NOTA

Tanto el asistente como el conductor pueden realizar los procedimientos de plegado y desplegado del scooter.

El material del asiento ha sido probado según la norma de inflamabilidad ISO 7176-16.

El scooter eléctrico dispone de un soporte anterior para la pelvis que se puede instalar como cinturón.

La autonomía del scooter depende de las condiciones de la carretera, la calidad de la batería y la presión de los neumáticos.



ATENCIÓN

POR FAVOR, APAGUE EL SCOOTER ANTES DE PLEGARLO/DESPLEGARLO

AL PLEGAR Y DESPLEGAR EL SCOOTER TENGA CUIDADO DE NO PILLARSE LOS DEDOS




No abra nunca la caja de la batería. Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con su distribuidor local autorizado o con el servicio técnico para obtener ayuda y asistencia.

El scooter necesita plegarse correctamente antes de cualquier transporte.

Cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad se considera un accesorio opcional para el scooter S19. **Se puede instalar en el asiento (véase foto a continuación).**

Para la instalación del cinturón de seguridad, consulte al distribuidor local autorizado.

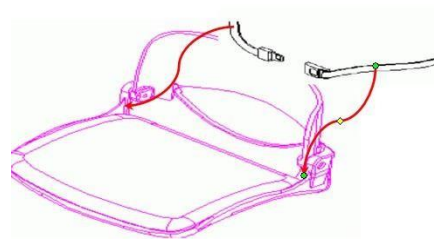

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

El scooter eléctrico es sencillo manejar. No obstante, le recomendamos leer detenidamente las siguientes instrucciones para que se familiarice con su nuevo vehículo.

No utilice este scooter eléctrico si muestra un comportamiento anormal o errático.

Tanto el asistente como el conductor podrán manejar el panel de control.

Advertencia:

Antes de encender el scooter, tenga siempre en cuenta el espacio que le rodea para seleccionar la velocidad deseada. En el caso de espacios interiores, le recomendamos que utilice la velocidad más baja. Si va a utilizarlo en el exterior, le recomendamos que seleccione una velocidad que le resulte cómoda para poder controlar el scooter con seguridad.


Para manejar el vehículo con el regulador de manera segura debe seguir los siguientes pasos.

Funciones de los botones

Botón de encendido


Inserte la llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj para encender el scooter.

Para apagarlo, gírela en sentido contrario.

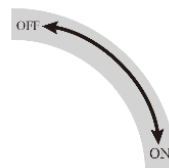

- A. Claxon – Pulse este botón para hacer sonar el claxon.
- B. Llave - Para encender su S19 inserte la llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Para apagarlo, gírela en sentido contrario. Si necesita una llave adicional o de repuesto, la llave correspondiente al S19 es una 606.
- C. Indicador de batería - cuando el S19 esté encendido, el led del indicador se desplazará a través de la escala, desde el sector “rojo” de la izquierda hacia el sector “verde” de la derecha, indicando el estado de carga de la batería. A medida que se vaya agotando la batería, el led irá desplazándose lentamente hacia el sector “rojo”, indicando el estado de carga en ese preciso momento. Cuando el led se encuentre totalmente a la derecha, la batería estará totalmente cargada. Cuando el led se vaya desplazando hacia el sector rojo, la batería estará perdiendo fuerza, pero aún le queda carga. Para más información, consulte el apartado sobre Carga de Baterías.
- D. Luz de Encendido – aparecerá una luz verde cuando su S19 esté encendido. También se mostrara en forma de destellos en caso de error del scooter. En este caso cuente el número de destellos que hace.

- E. Ajuste de la velocidad - le permite preseleccionar la velocidad máxima deseada. El regulador es proporcional a la velocidad y permite fijarla en cualquier punto entre el mínimo y el máximo. Gire el botón del regulador en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el mínimo para una conducción suave, y en el sentido de las agujas del reloj hacia el máximo para aumentar la velocidad.
- F. Mandos de aceleración – también puede ajustar la velocidad de su S19 con los mandos de aceleración. Cuanto más empuje el mando, más rápido se desplazará su S19.
- G. Luces – con este interruptor podrá encender y apagar las luces.

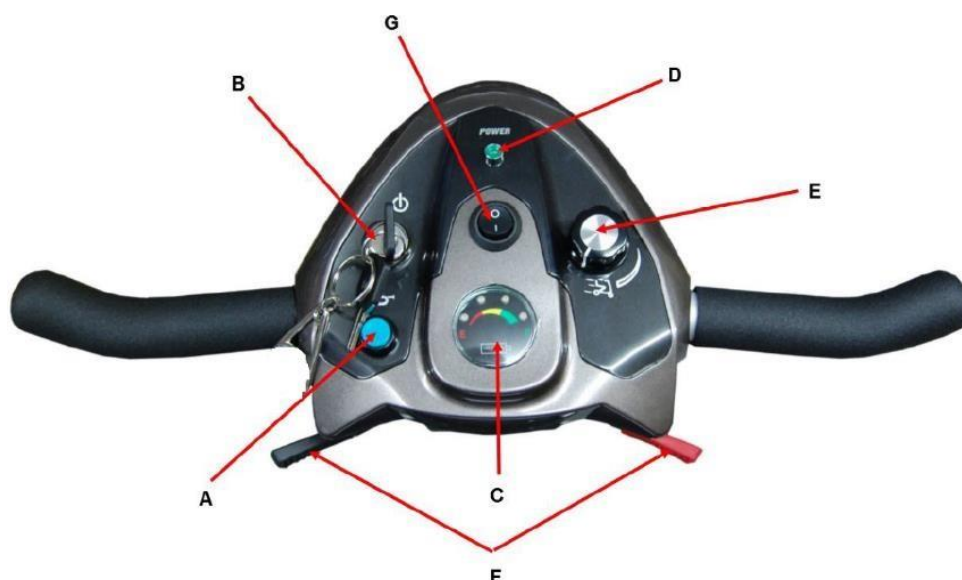

CONDUCCIÓN

A Regulador del interruptor ON/OFF

Introduzca la llave para encender el scooter (retire la llave para apagarlo). Desplace la palanca de dedo hacia adelante o hacia atrás para controlar la dirección del scooter (la palanca de dedo está situada a ambos lados del regulador y cuando se vuelva a dirigir el control de la palanca de dedo a su posición neutral (centro), se reducirá la velocidad y el vehículo se detendrá mediante la acción automática de los frenos electromagnéticos.



Palanca de dedo/
La fuerza máxima aplicada
a la palanca es de 4 N

B Mando de velocidad

Gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj hacia el máximo para aumentar la velocidad, y en el sentido contrario al de las agujas del reloj hacia el mínimo para disminuir la velocidad.

C Palanca de dedo

Con la palanca de dedo también puede controlar la velocidad de su vehículo. Cuanto más presione sobre la palanca de dedo (hacia adelante / atrás), más rápido se desplazará.

Notas:

- ⇒ Tras insertar la llave en el puerto ON/OFF del regulador, la luz de encendido ON/OFF se encenderá durante unos pocos segundos mientras el scooter realiza el proceso de autocomprobación.
- ⇒ Cuando el vehículo esté funcionando, la superficie del cargador se calentará ligeramente.
- ⇒ En caso de emergencia, suelte la palanca de dedo y el vehículo se detendrá.

PANEL DE CONTROL

1. El panel de control es una pantalla visual multifunción que ofrece gran cantidad de información sobre el vehículo.
Cuando el indicador entra en el sector rojo, la batería está baja y se debe recargar. Cuando el indicador llega al sector rojo, el scooter todavía cuenta con varios kilómetros de autonomía, por lo que no es imprescindible cargarlo de inmediato. El indicador que indica la batería restante solo baja cuando se utiliza la batería, independientemente del voltaje. Dicho indicador mide la batería restante y solo sube cuando se recarga.
2. El sistema se apagará cuando el voltaje de la batería sea inferior a 21,0V.
3. El sistema se apagará automáticamente cuando no se utilice durante más de 30 minutos. Deberá retirar la llave y volver a insertarla si desea reanudar la marcha.

RODADA LIBRE:

1. Los motores están diseñados para que se activen los frenos electromagnéticos cuando el scooter no esté siendo utilizado o cuando esté apagado (OFF). Asimismo, disponen de una función manual que les permite “rodar libremente” de manera que el scooter pueda rodar sin necesidad de estar encendido. El modo de rodada libre se acciona ajustando la palanca de rodada libre a dicha posición.
2. El accionamiento del modo de rodada libre ejercerá la función de freno de estacionamiento.



ATENCIÓN

- ⇒ No deje nunca accionado el modo de rodada libre del scooter en una pendiente.
- ⇒ No accione nunca el modo de rodada libre mientras esté conduciendo el scooter.
- ⇒ Recuerde siempre colocar la palanca en su sitio antes de encender el scooter.
- ⇒ APAGUE EL SCOOTER ANTES DE PLEGARLO/DESPLEGARLO.



Palanca de rodada libre/la fuerza máxima requerida de mano-brazo en la palanca es de 19 N para accionar y de 35 N para desconectar

Frenos electromagnéticos:

El scooter eléctrico incorpora Frenos Electromagnéticos, es decir, un freno de seguridad automático de disco magnético también conocido como freno de seguridad Fail-Safe. Los frenos electromagnéticos son automáticos y funcionan cuando el scooter eléctrico esté encendido, pero en estado estable (es decir, la palanca de control se dispone en la posición neutral), incluso cuando el scooter se encuentre en una pendiente. Los frenos electromagnéticos también se activarán siempre que el scooter eléctrico esté apagado, pero las palancas del motor estén accionadas en posición (vertical).

Freno de mano:

El freno electromagnético incluye una función de freno de mano automático. El scooter se detendrá cuando el motor esté activado y el botón de conexión esté apagado, o cuando el botón de conexión esté encendido y la palanca de control se encuentre en la posición neutral. Si el scooter está en modo de rodada libre (el motor está desconectado), puede utilizar la función de freno de estacionamiento manual solicitando a un asistente volver a desplazar la palanca de conexión/desconexión a la posición de conectado.

Protección térmica:


El regulador del scooter eléctrico está equipado con un sistema de seguridad denominado retroceso térmico. Un circuito integrado controla la temperatura del regulador y del motor. En el supuesto de que el regulador y el motor se calienten en exceso, el regulador interrumpirá la alimentación para permitir que se refrigeren los componentes eléctricos. A pesar de que su scooter eléctrico reanudará la velocidad normal cuando la temperatura vuelva a un nivel de seguridad, le recomendamos esperar 5 minutos antes de restablecer la marcha con el fin de permitir que los componentes se enfríen.

Conceptos	Especificaciones
Capacidad nominal	10,72Ah
Capacidad típica	10,05Ah
Tensión nominal	25,2V
Tensión máx. de carga	29,4V
Corriente de carga	<6A
Temperatura de funcionamiento	+10°C~+45°C
	-20°C~+60°C
Condiciones de conservación	-20°C~+50°C
	-20°C~+40°C
	-20°C~+20°C
Protección tensión de descarga	≤19,6V durante 3 segundos
	Activación ≥24,5V
Protección sobretensión de carga	≥29,75V durante 3 segundos
	Activación ≥29,05V
Protección temperatura descarga	≤-20°C o ≥60°C durante 3 segundos
	Activación ≥-15°C o ≤55°C durante 3 segundos
Protección temperatura de carga	≤10°C o ≥45°C durante 3 segundos
	Activación ≥15°C o ≤40°C durante 3 segundos
Protección corriente de descarga	20A máx. continua
	≥27A durante 60 segundos ± 0,26 segundos
	≥40A durante 10 segundos ± 0,26 segundos
	≥43A durante 5 segundos ± 0,26 segundos
	≥46A durante 2,5 segundos ± 0,26 segundos
	≥50A±2A durante 40 msegundos ±10 msegundos
	Corriente cortocircuito
	≥133A±10A durante 400 μsegundos
	±250 μsegundos
	Tiempo de activación≥10 segundos ± 0,25 segundos

ATENCIÓN

NO utilice este scooter con las baterías descargadas ya que podría detenerse en mitad de un trayecto.

Por favor, retire el paquete de baterías del scooter antes de guardarlo durante un espacio de tiempo prolongado.

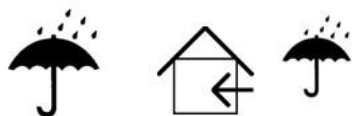

¡Prohibido! Aunque el scooter ha superado los requisitos de la prueba de pulverización de agua IPX4, mantenga las conexiones eléctricas alejadas de fuentes de humedad, incluida la exposición directa al agua o a fluidos corporales y la incontinencia. Compruebe con frecuencia los componentes eléctricos en busca de indicios de corrosión y sustitúyalos si es necesario.

¡Atención! El cargador solo se deberá utilizar en espacios interiores y secos, protegido de la humedad y el agua.

Aunque no utilice el scooter, recomendamos cargar periódicamente las baterías.

Nota: No utilizar baterías de automóviles.

No están diseñadas para soportar una descarga larga e intensa y su uso no es seguro en un scooter eléctrico.

A menudo, la vida útil de una batería es el reflejo de los cuidados que recibe.

EXTRAER LA BATERÍA



Para extraer la batería de su S19, asegúrese primero de que esté desbloqueada insertando la llave en la caja y girando 90° en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta la posición de desbloqueo. A continuación, basta con extraer la batería de la base del scooter y del asiento utilizando para ello el asa que lleva incorporada.

Se puede retirar la batería sin necesidad de utilizar herramientas.

En caso de observar que el giro de la llave ofrece mucha resistencia, realice presión sobre la batería al mismo tiempo que gira la llave.

CARGADOR DE BATERÍA


El cargador de la batería toma la tensión estándar de la toma de corriente de la pared (corriente alterna) y la convierte en corriente continua (DC). Las baterías utilizan corriente continua para poder hacer funcionar el scooter eléctrico. Cuando las baterías estén completamente cargadas, el amperaje del cargador estará casi en cero. De esta forma, el cargador mantiene una carga pero sin sobrecargar la batería.

Nota 1: Las baterías no pueden cargarse si se han descargado hasta casi una tensión cero.

Nota 2: El scooter eléctrico cumple los requisitos de la ISO 7176-14:2008 y la ISO 7176-21:2003.

Nota 3: Utilice únicamente el modelo de cargador de batería proporcionado por el vendedor del scooter.

La utilización de cualquier otro tipo de cargador puede resultar peligrosa y precisa la aprobación del fabricante.

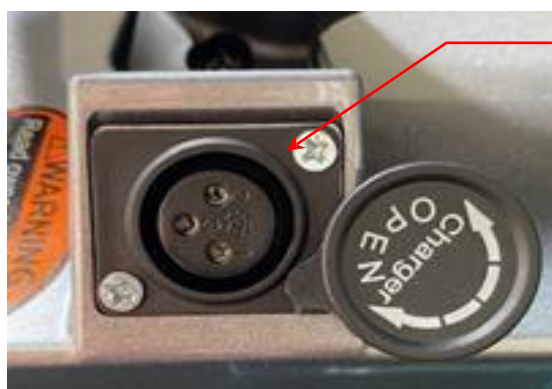

Este es el puerto del cargador

Descripción

El NL07C-25HT es un cargador inteligente diseñado especialmente para baterías de iones de litio de 7 celdas en serie.

Especificaciones eléctricas:

1. Entrada: 100~240VAC, 50/60 Hz Salida: $29,05V \pm 0,2V$ $2,5A_{dc} \pm 10\%$
2. Salida del cargador: El cargador viene preconfigurado de fábrica para cargar baterías de iones de litio de 7 celdas.
 - (1) Modo corriente constante (CC): al comienzo de la carga, corriente constante de carga de $2,5A_{dc} \pm 10\%$ para cargar el conjunto de baterías hasta alcanzar una tensión de $29,5V \pm 0,2V$.
 - (2) Modo tensión constante (CV): la salida se mantendrá constante en $29,05V \pm 0,2V$ hasta el final de la carga.
 - (3) Estado pre-carga: cuando la tensión de la batería sea inferior a $21V \pm 1V$, se pondrá en marcha la pre-carga.
La corriente de carga es el 30% de la corriente de carga CC: $0,75A_{dc} \pm 10\%$.

GRÁFICO DE SEÑALES INDICADORAS

LED 1	LED 2	Estado	Indicadores
OFF	ON	Encendido (Encendido enchufando la fuente de CA y sin batería) Parpadea tres veces y a continuación ON	
ON	OFF	Modo de corriente constante	
ON	OFF	Modo de tensión constante	
ON	ON	Batería completamente cargada (Corriente $\leq 300 \pm 100\text{mA}$)	
Parpadeo lento	OFF	Modo precarga	
LEDs rojas y verdes parpadean de forma sincronizada		Fallo modo precarga	
LEDs rojas y verdes parpadean de forma rápida y alternativa		Sobretensión, sobrecorriente, fallo de CC CV	

Especificaciones mecánicas:

1. Dimensiones: 167*74*37 mm.
2. Peso: 410g aprox.
3. Salida cargador: conector 3 clavijas. (Clavija 1- Positiva; Clavija 2 - Negativa; Clavija 3 - Negativa)
4. Enchufe CA: rectangular 2 clavijas estándar
5. Cable CA: Tipo enchufe pared nacional bajo pedido.

Procedimientos de funcionamiento:

1. ¡Atención!: Conectar primero el cargador a la corriente alterna ***antes*** de conectar la batería al cargador. Al enchufarlo en la red de corriente alterna el indicador de “encendido” se iluminará y el indicador de “Estado” se pondrá en color VERDE; a continuación, conectar el conjunto de baterías al cargador.
2. Si se produce un cortocircuito en la salida, el indicador de “Estado” alternará entre el color ROJO (16ms) y el VERDE (496ms). La intermitencia durará hasta que el sistema se haya reajustado y se haya retirado la pieza.
3. Durante la carga, el indicador de “Estado” se pone en ROJO. Una vez finalizada la carga, cambia a VERDE.
4. Para evitar el fallo de las baterías, cuando el cargador permanezca en estado de precarga durante más de 5 horas, dejará de cargar y el indicador de “Estado” mostrará una luz intermitente cada segundo para indicar error de precarga.
5. Durante la carga, el usuario puede retirar la batería del cargador en cualquier momento que lo desee. Los usuarios también podrán comenzar a cargar la batería en cualquier momento. El cargador puede determinar el mejor momento para reanudar el proceso de carga.
6. En caso de problemas, verifique el estado de las baterías y repita los pasos anteriores. Si el problema persiste, póngase en contacto con el fabricante para recibir asistencia técnica.

Verificaciones antes de utilizar el scooter:

1. Compruebe que el juego de baterías sea compatible con el cargador NL07C antes de conectarlo.
2. El conector de 3 clavijas del cable de salida viene preconfigurado de fábrica. No cambie las conexiones ante la posibilidad de causar graves peligros.
3. El cargador NL07C está diseñado para ser utilizado únicamente con baterías METCO y no se recomienda utilizarlo con otros juegos de baterías. Los juegos de baterías de otros fabricantes deberán ser aprobados por METCO antes de utilizar el cargador.
4. El cargador NL07C es una herramienta de precisión y debe mantenerse alejado de dispositivos que emitan elevadas radiaciones electromagnéticas.

¡Atención! No utilice nunca este cargador para cargar baterías no recargables.



ATENCIÓN

Cargue siempre las baterías en zonas bien ventiladas.

El cargador solo se deberá utilizar en espacios interiores y secos. Se debe proteger frente a la humedad.

Para un máximo rendimiento se recomienda cambiar ambas baterías al mismo tiempo cuando estén bajas.

Si no se va a utilizar el scooter eléctrico durante un espacio de tiempo prolongado, recargue las baterías al menos una vez al mes para evitar su deterioro.

¿Se puede utilizar un cargador diferente? Se debe tener en cuenta que los cargadores se seleccionan específicamente para aplicaciones determinadas y se ajustan al tipo y al tamaño de las baterías. Para recargar su scooter de forma segura y eficiente, recomendamos utilizar únicamente el cargador suministrado como equipo original con su scooter Wellell. Se prohíbe utilizar cualquier método de carga que recargue las baterías de forma individual.

Según el tipo de baterías y el estado en el que se encuentren, se suelen cargar completamente en 4-10 horas.

Esto se indicará cuando la luz de estado en el panel lateral del cargador de baterías se ponga verde.

Cargar la batería más tiempo del necesario no dañará la batería.

Le recomendamos que cargue las baterías durante la noche si ha usado el scooter, la carga durara entre 8 y 10 horas. No cargue la batería durante más de 24 horas.

Nota: El chasis presenta una etiqueta con el diagrama de conexiones de la batería. Por favor, consúltelo antes de montar la batería.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL CARGADOR

- Lea las instrucciones de funcionamiento del cargador antes de utilizarlo.
- Asegúrese de cargar siempre la batería después de utilizar su scooter eléctrico.
- Si no utiliza el scooter eléctrico, cargue la batería como mínimo semanalmente.
- Si la batería no se puede cargar (la luz naranja no pasa a verde) o si la luz naranja se vuelve verde de forma inmediata, consulte al servicio técnico.

La batería podría estar defectuosa.

- Si en el cargador aparece una luz roja, compruebe por favor si está estropeado o si falla la conexión eléctrica.

- Mantenga limpios los bornes de la batería para que la carga se pueda realizar de manera eficiente.
- Solo el personal técnico o los proveedores autorizados estarán autorizados a sustituir en neumático PU si fuera necesario.

Manipulación durante el montaje

- 1) No utilice las baterías si han sufrido golpes o se han caído.
- 2) Tampoco utilice la batería si se encuentra estropeada.

Conservación de las baterías

- 1) Mantenga las baterías en buen estado de funcionamiento mientras estén almacenadas durante largos periodos de tiempo (40%~60% SOC o 25V~26V de rango de tensión).
- 2) Se recomienda inspeccionar las baterías cada 6 meses para comprobar que se encuentren en buen estado tras almacenarse durante un espacio prolongado de tiempo. Si no se encontrasen en el estado indicado en el punto 1) deberá cargarlas o descargarlas hasta alcanzar el estado de conservación recomendado.
- 3) Se deben mantener en un ambiente seco y de baja humedad, especialmente protegidas frente a las altas temperaturas.
- 4) No almacene las baterías cerca de fuentes de calor ni en lugares expuestos a la luz solar directa.

Prohibiciones

- 1) No arroje las baterías al fuego, ni las exponga a fuentes de calor.
- 2) No desmonte ni modifique el juego de baterías.
- 3) No deje la batería expuesta a altas temperaturas (45°C o más).
- 4) No sumerja la batería en agua, ni la deje expuesta a una humedad elevada.
- 5) No golpee ni deje caer las baterías.
- 6) No suelda plomo directamente a la carcasa de las baterías.
- 7) No caliente ni suelde los bornes de la batería.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Su scooter está diseñado para un mantenimiento mínimo. No obstante, como cualquier vehículo motorizado, requiere una serie de revisiones rutinarias. Para mantener el buen funcionamiento de su S19 durante años, le recomendamos realizar las siguientes revisiones.

COMPROBACIONES DIARIAS

1. Comprobación visual del estado de los neumáticos.
2. Inspección del medidor del estado de la batería en el regulador para determinar si es necesario recargarla.

COMPROBACIONES MENSUALES

1. Inspeccione visualmente los arneses del regulador. Asegúrese de que no estén dañados, rasgados, ni presenten cables expuestos.

COMPROBACIONES SEMESTRALES

REVISIONES:

Asegúrese de mantener limpio el regulador protegiéndolo de la lluvia o el agua. Nunca limpie su scooter con una manguera ni lo ponga en contacto directo con el agua.

Mantenga las ruedas limpias, sin pelusas, pelos, arena y fibras de alfombra.

Inspeccione visualmente la banda de rodadura de los neumáticos. Si es inferior a 1 mm (1/32"), contacte con su distribuidor local para sustituirlos.

Puede lavar toda la tapicería con agua tibia y jabón suave. Compruebe cada cierto tiempo que el asiento y el respaldo no estén combados y no presenten cortes ni desgarros. Sustituya la tapicería si es necesario. No guarde su scooter en un lugar húmedo ya que podría aparecer moho y las partes tapizadas podrían deteriorarse rápidamente.

Para los mecanismos móviles basta una simple lubricación e inspección. Lubrique con vaselina o aceite suave. No utilice aceite en exceso ante la posibilidad de que las pequeñas gotas manchen y dañen las alfombrillas y los accesorios, entre otros elementos.

Realice siempre una inspección general para asegurarse de que las tuercas y los tornillos estén bien fijados.

Limpieza y desinfección

Utilice un paño húmedo y un producto de limpieza no abrasivo para limpiar las piezas de plástico y metal de su scooter eléctrico. No utilice productos que puedan rayar la superficie.

Si fuera necesario limpie su vehículo con un desinfectante autorizado. Antes de aplicarlo compruebe que su uso es seguro. Siga las instrucciones de seguridad para el uso correcto del desinfectante y/o producto de limpieza antes de aplicarlo a su vehículo. El uso incorrecto del mismo podría provocar irritación de la piel o un deterioro prematuro de la tapicería y acabados del scooter.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGO DE ERROR

Regulador P&G S-Drive 45 Amp: Su scooter está equipado con un regulador S-Drive, que monitoriza continuamente las condiciones de funcionamiento de su scooter. Si detecta un problema, lo indicará con un mensaje de error mediante una luz parpadeante de encendido/apagado. Debe contar el número de parpadeos y consultar la lista para comprobar qué tipo de error ha ocurrido según el número. Que el indicador parpadee no tiene porque ser que el scooter tenga un problema en muchos casos es simplemente una forma de proteger el equipo de daños mayores.

Parpadeos	Descripción
1	Es necesario cargar la batería o puede que la batería no esté bien conectada. Compruebe las conexiones de la batería y, si son correctas, intente cambiar la batería.
2	Mala conexión del motor. Compruebe todas las conexiones entre el motor y el regulador.
3	El motor tiene un cortocircuito en una conexión de la batería. Contacte con el servicio de mantenimiento.
4	El interruptor de rodada libre está activado o el mecanismo de desconexión del freno de mano está accionado. Compruebe la posición de la palanca.
5	No utilizado
6	Se está inhibiendo la conducción del S-Drive. La inhibición 2 está activa. Puede deberse a que el cargador de la batería esté conectado o a que el asiento no esté en posición de conducción.
7	Indica fallo del acelerador. Compruebe que el acelerador esté en posición de reposo antes de conectar el scooter.
8	Indica fallo del regulador. Compruebe que todas las conexiones estén en correcto estado.
9	El freno de mano tiene mala conexión. Compruebe las conexiones del freno de mano y del motor. Asegúrese de que las conexiones del regulador estén en correcto estado.
10	Se ha aplicado una tensión excesiva al regulador. Generalmente se debe a una mala conexión de la batería. Compruebe las conexiones de la batería.

Ante cualquier problema técnico, se recomienda que consulte a su distribuidor local antes de intentar solucionarlo por su cuenta.

Las siguientes situaciones podrían indicar un problema grave en su scooter.

Póngase en contacto con su distribuidor local si se produce cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Ruido en el motor
2. Arnéses rasgados
3. Conectores agrietados o rotos
4. Desgaste desigual de cualquiera de los neumáticos
5. Movimiento brusco
6. Desvío hacia un lado
7. Ruedas dobladas o rotas
8. El scooter no se enciende
9. El scooter se enciende, pero no se mueve

Garantía

En el caso de una reclamación **el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.**

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien; para cualquier duda o reclamación, puede enviarnos un e-mail a incidencias@wellell.com o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que WELLELL entrega el producto al cliente.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar del cliente donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto, es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

WELLELL declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligroso de esta silla, por su falta de mantenimiento o por no seguir las indicaciones del manual de uso.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a WELLELL.

**Wellell se reserva el derecho de modificar las características de sus productos.*

**Cualquier incidente grave relacionado con este producto deberá ser comunicado inmediatamente a su proveedor.*

Be well, Live well

Wellell



Heartway Medical Products. Co. Ltd.

No. 6, Gongyequ 25th Rd., Baoshan Vil., Nantun Dist. Taichung
City 408017, Taiwan (R.O.C.)



Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain



Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain



Europäischer Bevollmächtigter / Authorized Representative

Emergo Europe / Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem The Netherlands



Respete las normas de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Este producto debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió este producto.



INFORMACIÓN SOBRE BATERÍAS

Si desea viajar en avión, por favor consulte la normativa al respecto a través del siguiente enlace:



Por favor contacte con Wellell Iberia si necesita más información.

Wellell

Wellell Iberia SL
Elcano, 9 - 6º.
48008 Bilbao (Bizkaia) SPAIN
Tel: (+34) 94.470.64.08
Fax: (+34) 94.470.64.09
info@wellell.com
<http://www.wellell.com>

¿Qué cuidados necesitan las **baterías**?

Buenas prácticas para la **conservación** de las baterías

Primera carga



Antes de su primer uso, carga la batería **POR COMPLETO**.

Ten en cuenta que la batería adopta su capacidad máxima tras cargarse aproximadamente 10-15 veces por completo.

Mantenimiento



Carga la batería por completo **SIEMPRE** tras su uso.



Evita que el nivel de batería descienda por debajo de 2 led o 20% de capacidad.

Una descarga completa provoca daños irreversibles. Además, hacerlo de forma continuada, merma la capacidad de la batería y reduce su vida útil.

Almacenamiento

Si **NO** utilizas el equipo:

< 1
mes



A lo largo de un mes, realiza al menos una carga completa cada 15 días.

> 1
mes



Durante más de un mes, realiza una carga completa cada 15 días y retira la batería del equipo.

Wellell

✉ info@wellell.com

👤 944.70.64.08

