

Silla Alfa

Silla PCI

Manual de Uso



PROPÓSITO DEL MANUAL

El manual de uso está diseñado para personas que cuidan a niños con discapacidades (asistentes de cuidado infantil, padres, tutores). También está destinado a médicos y fisioterapeutas que manejan la silla PCI.

¡ATENCIÓN! Antes de utilizar la silla PCI, cada Usuario está obligado a leer el manual y actuar de acuerdo con sus directrices.

¡ATENCIÓN! En caso de cualquier incidente médico relacionado con la presencia de la silla PCI ALFA, el fabricante/distribuidor debe ser notificado inmediatamente por escrito poniéndose en contacto con él por carta certificada o correo electrónico con acuse de recibo.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios técnicos y comerciales en el contenido del Manual de Uso y Mantenimiento sin previo aviso. Cada cambio estará determinado por la fecha en que se actualizaron las instrucciones por última vez.

¡ATENCIÓN! Las imágenes proporcionadas en el manual de operación son solo para referencia y pueden variar del modelo comprado.

El fabricante ha implementado un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 13485 en el diseño, producción y venta de productos sanitarios de clase I.. Sistema certificado por LL-C (Certificación).



ISO 13485
LL-C (Certification)



TABLA DE CONTENIDOS

1.	FINALIDAD E INDICACIONES DE USO	5
2.	ETIQUETAS.....	5
3.	SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS.....	5
4.	INSTRUCCIONES IMPORTANTES Y REGLAS DE SEGURIDAD	6
5.	CONSTRUCCIÓN GENERAL DE LA SILLA.....	7
6.	FUNCIONES DE LA SILLA	9
6.1.	Desplegado de la silla.....	9
6.2.	Plegar el chasis de la silla.....	10
6.3.	Bloqueo de transporte. Colocación y desmontaje del bloqueo de transporte	11
6.4.	Ruedas delanteras giratorias. Bloqueo direccional de las ruedas delanteras.....	12
6.5.	Ruedas traseras. Montaje y desmontaje de las ruedas traseras en el eje	12
6.6.	Sistema de amortización de la rueda trasera	13
6.7.	Asa de empuje para la silla.....	13
6.8.	Freno central	14
6.9.	Pie basculante.....	14
6.10.	Mecanismo para fijar el respaldo al marco de la silla.....	15
6.11.	Ajuste de la profundidad del asiento	16
6.12.	Ajuste del chasis para cambiar el ángulo del asiento	17
6.13.	Ajuste de la altura del respaldo.....	18
6.14.	Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo.....	18
6.15.	Reposapiés.....	19
6.16.	Cinturones de cinco puntos.....	20
6.17.	Reposacabezas.....	21
6.18.	Soporte de almohadillas toracolumbares ajustables	22
6.19.	Almohadillas de cadera ajustables	22
6.20.	Elementos laterales del respaldo	23
6.21.	Cinturones de abducción y estabilización	24
6.22.	Barra de seguridad	24
6.23.	Capota ajustable con ventana	25
6.24.	Portavasos	25
7.	EQUIPAMIENTO ADICIONAL	26
7.1.	Mesa de terapia ajustable (colocada en lugar de barra de seguridad).....	26
7.2.	Mochila	26
7.3.	Bolsa bajo asiento.....	26
7.4.	Guantes de invierno	27
7.5.	Taco abductor.....	27
7.6.	Cubierta para la lluvia	27
7.7.	Saco de dormir para las piernas	28
7.8.	Mosquitera (unida a la capota ajustable con ventana).....	28
7.9.	Sombrilla.....	28
8.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SILLA ALFA	29
8.1.	Composición del material de la silla.....	29

9.	ENTREGA Y HERRAMIENTAS.....	30
10.	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA SILLA.....	30
11.	PREPARACIÓN PARA EL USO	31
12.	MOVER LA SILLA.....	32
13.	SUBIR Y BAJAR DE LA SILLA.....	32
14.	POSICIÓN CORRECTA DE LA SILLA.....	32
15.	USO DE LA SILLA.....	33
16.	MOVERSE SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS.....	33
17.	SUPERACIÓN DE UMBRALES O RESTRICCIONES.....	33
18.	TRANSPORTE EN EL COCHE Y EN OTROS VEHÍCULOS	34
19.	LIMPIEZA Y CUIDADO	34
20.	ALMACENAMIENTO.....	34
21.	REVISIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS.....	35
22.	UTILIZACIÓN.....	36
23.	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PRODUCTOS SANITARIOS.....	36
24.	GARANTÍA.....	37

1. FINALIDAD E INDICACIONES DE USO

La silla PCI para necesidades especiales ALFA es un dispositivo médico de clase I indicado para su uso por niños discapacitados que, debido a su estado de salud, no pueden caminar, permanecer de pie o sentarse de forma independiente. El producto está diseñado para el transporte y movimiento de las personas mencionadas anteriormente en posición sentada o acostada, y para la corrección de la postura, y este es su uso previsto.

Las indicaciones clínicas incluyen parálisis cerebral, hernia meníngea, distrofias, paresias, etc.

El producto está destinado a usuarios de 100-150 cm de altura y hasta 55 kg de peso. El producto debe utilizarse de acuerdo con las recomendaciones del médico tratante o fisioterapeuta.

Contraindicaciones:


En caso de contraindicación para la posición sentada y/o la posición erguida pasiva, el ajuste de la silla PCI debe consultarse con un fisioterapeuta o médico tratante.

2. ETIQUETAS


Etiqueta de identificación



Etiqueta de código UDI

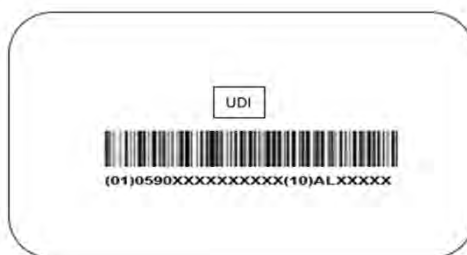

Etiqueta de advertencia

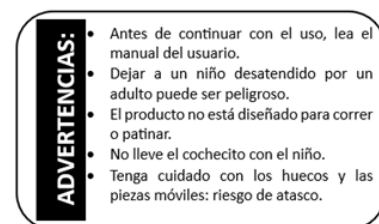

3. SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS

	Número de serie del producto		El nombre del fabricante
	Peso total permitido del usuario		El producto es un dispositivo médico
	Fecha de fabricación		DESCRIPCIÓN "¡ADVERTENCIA!" y el símbolo de este manual se utilizan para mejorar la atención del lector al contenido marcado con este signo. El incumplimiento de los contenidos marcados con esta descripción puede poner en peligro la salud y la seguridad del usuario y de los acompañantes, así como dañar el producto.
	Marca de evaluación de la conformidad según las normativas y directivas europeas aplicables		
	Advertencia sobre cómo proceder de acuerdo con el Manual de uso y mantenimiento del producto		

4. INSTRUCCIONES IMPORTANTES Y REGLAS DE SEGURIDAD

- Está prohibido utilizar la silla PCI de una manera para la que no esté destinada.
- ¡El producto contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas si un niño las ingiere!
- **Debido a la alta capacidad de ajuste de la silla PCI, durante el ajuste del ángulo del asiento y el ajuste del ángulo del respaldo, es posible establecer una posición en la que la cabeza del niño esté por debajo de la línea pélvica. Está prohibido utilizar esta posición, ya que podría provocar el peligro de que el niño trague o se ahogue.**
- Está prohibido colocar peso adicional en la silla PCI, lo que se aplica en particular a colocar peso adicional en la parte posterior del respaldo, por ejemplo, una mochila o un bolso. ¡Esto puede hacer que la silla PCI se vuelque y lesione al usuario! No se aplica a los accesorios adicionales originales dedicados a la silla ALFA que no superen la carga permitida. Todos los elementos adicionales adjuntos a la silla afectan su estabilidad.
- **¡ATENCIÓN!** Los ajustes se deben realizar sin peso (usuario). Al usar, plegar y ajustar los mecanismos de la silla PCI, puede existir el riesgo de quedar atrapado y/o apretar algunas partes del cuerpo del usuario/cuidador.
- **¡ATENCIÓN!** Dependiendo de los ajustes realizados: configuración del asa de empuje de la silla PCI, el ajuste de la altura del respaldo, el ajuste del ángulo del respaldo, el ajuste de la profundidad del asiento, el ajuste del ángulo del asiento, el ajuste del ángulo del reposapiés y el ajuste del reposapiés; esta silla PCI puede exceder las dimensiones máximas recomendadas.
- **¡ATENCIÓN!** Al pasar por puertas o restricciones similares, asegúrese de que haya suficiente espacio a ambos lados de la silla PCI para evitar que las manos u otras partes del cuerpo se pellizquen, así como para evitar daños a la silla PCI.
- **¡ATENCIÓN!** La temperatura de la silla PCI puede aumentar cuando está expuesta a la luz solar.

¡ADVERTENCIA!



- ¡Nunca deje a su hijo desatendido en la silla PCI.
 - Este producto no es adecuado para correr, patinar o patinar sobre ruedas.
 - Tenga cuidado con los huecos y las piezas móviles, ya que existe el riesgo de atascos.
 - No transporte la silla PCI con el niño dentro.
 - La silla PCI está empaquetada en una bolsa de plástico. Manténgala fuera del alcance de los bebés y niños pequeños.
 - No desplazar la silla con el freno o bloqueos activados.
-
- **¡ATENCIÓN!** Está prohibido utilizar la silla PCI si su estado o el de un solo componente genera dudas en el usuario o es claramente anormal. En tal situación, se recomienda ponerse en contacto urgentemente con el Vendedor para obtener asesoramiento.

5. CONSTRUCCIÓN GENERAL DE LA SILLA PCI

Equipamiento básico



- 1- Capota con ventana
- 2- Bloqueo del mecanismo de plegado del chasis
- 3- Portavasos
- 4- Barra de seguridad
- 5- Mecanismo de ajuste del ángulo de todo el reposapiés
- 6- Ajuste de la longitud del reposapiés
- 7- Mecanismo de liberación rápida de la rueda trasera
- 8- Bloqueo direccional de las ruedas delanteras
- 9- Reposacabezas
- 10- Almohadillas toracolumbares
- 11- Cinturones de cinco puntos
- 12- Almohadillas para la cadera
- 13- Cinturones de abducción y estabilización
- 14- Tapicería de respaldo y asiento desmontables
- 15- Reposapiés ajustable con correas
- 16- Ruedas delanteras giratorias

- 17- Elementos laterales del respaldo
- 18- Ajuste de la altura del respaldo
- 19- Bloqueo para transporte
- 20- Asa de empuje para la silla PCI
- 21- Mecanismo de ajuste de ángulo para el manillar de empuje
- 22- Ajuste del ángulo del respaldo
- 23- Mecanismo de plegado del chasis
- 24- Mecanismo de ajuste del ángulo del respaldo
- 25- Ajuste de la profundidad del asiento
- 26- Ajuste del ángulo del asiento
- 27- Sistema de amortización de la rueda trasera
- 28- Pie basculante
- 29- Freno central
- 30- Ruedas traseras

Accesorio



1- Sombrilla

2- Cesta

3- Saco de dormir para las piernas

4- Cubierta para la lluvia

5- Mosquitero

6- Cuña


7- Mesa terapéutica

8- Guantes de invierno

9- Mochila

6. FUNCIONES DE LA SILLA PCI

6.1 Desplegar la silla PCI

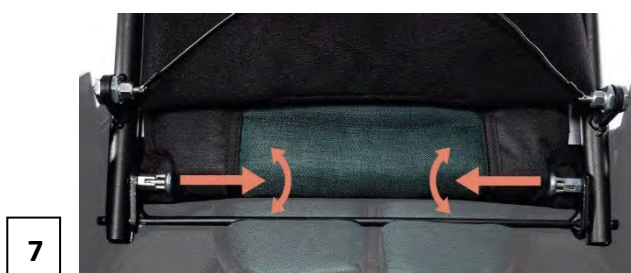

Deslice los pasadores en los orificios de ambos lados. Bloquee el mecanismo de fijación del respaldo



9



10

Tire del asa hacia arriba y ajuste el ángulo del respaldo

6.2. Plegar el chasis de la silla PCI



1



2

Desbloquee el mecanismo de fijación del respaldo



3



4

Bajar el mecanismo. Quitar el respaldo



Presione el botón rojo. Tire simultáneamente de las manijas a ambos lados del marco hacia arriba



Coloque el candado de transporte

6.3. Bloqueo de transporte. Colocación y desmontaje del candado de transporte



Bloqueo aplicado



Bloqueo eliminado

6.4. Ruedas delanteras giratorias. Bloqueo direccional de las ruedas delanteras

Bloqueo de las ruedas delanteras



Desbloqueo de las ruedas delanteras



6.5. Ruedas traseras. Montaje y desmontaje de las ruedas traseras en el eje

Montaje de la rueda

1



2



3



Desmontaje de ruedas



6.6. Sistema de amortización de la rueda trasera



Suspensión dura



Suspensión blanda

6.7 Manillar de empuje para la silla PCI

Mecanismo de ajuste de ángulo para la manija de empuje



Presione los botones de ambos lados y cambie el ángulo del manillar de empuje.

Ajuste del ángulo del manillar de empuje



6.8. Freno central



El freno central se utiliza solo para el bloqueo total de las ruedas, no hay función de frenado dinámico. No se puede desplazar la silla con el freno activado.

6.9. Pie basculante



El uso de un pie inclinable facilita la conducción de la silla PCI por pequeños umbrales o bordillos.

6.10. Mecanismo para fijar el respaldo al chasis de la silla PCI

Montaje del respaldo en el chasis




El mecanismo de montaje del respaldo se encuentra en la parte trasera del asiento.



Deslizamiento en el respaldo



Mecanismo desbloqueado a la altura de los orificios en ambos lados

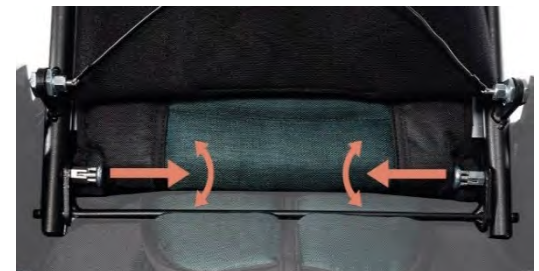

Deslice los pasadores en los orificios de ambos lados



Bloqueo del mecanismo de fijación del respaldo



Tire del asa hacia arriba y ajuste el ángulo del respaldo

Extracción del respaldo del marco



Desbloquee el mecanismo de fijación del respaldo



Bajar el mecanismo



Quitar el respaldo

6.11. Ajuste de la profundidad del asiento



Profundidad mínima del asiento



Profundidad máxima del asiento

Tire del asiento hacia usted o deslícelo hacia adentro.



¡ATENCIÓN! Para ajustar la profundidad del asiento, use una llave Allen (incluida).

6.12. Ajuste del chasis para cambiar el ángulo del asiento

Mecanismo de ajuste del ángulo del asiento



Asegúrese de que los pasadores se hayan encajado en ambos lados de la silla PCI.

Ajuste del ángulo del asiento



6.13. Ajuste de la altura del respaldo



Alturas mínimas de ajuste del respaldo



Alturas máximas de ajuste del respaldo



Botón para ajustar las alturas del respaldo



¡ATENCIÓN! Para ajustar la altura del respaldo, utilice una llave Allen (incluida).

6.14. Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo

Mecanismo de ajuste del ángulo del respaldo



¡Atención! Cada vez que cambia el ángulo del respaldo, debe reajustar la longitud de los cinturones de cinco puntos.

Ajuste del ángulo del respaldo



Presione los botones de ambos lados y cambie el ángulo del respaldo.

6.15. Reposapiés

Ajuste de la altura del reposapiés



Altura mínima



Altura máxima

Ajuste del ángulo del reposapiés






¡Atención! Al transportar, almacenar, entrar y salir de la silla PCI, la placa del reposapiés debe estar plegada.

6.16. Cinturones de cinco puntos



6.17.

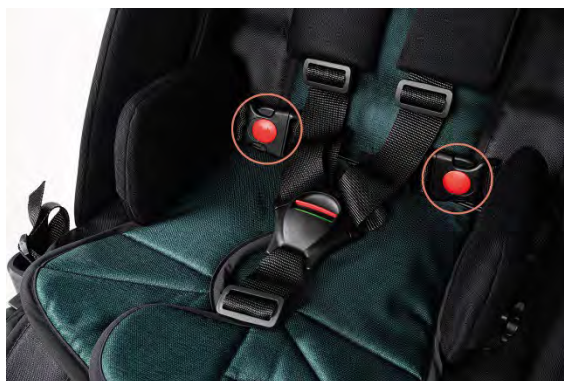


¡Atención! Al retirar el respaldo, separe los cinturones en el lugar marcado.

Recuerde abrochar los cinturones al montar el respaldo.

¡Atención! Cada vez que cambia el ángulo del respaldo, debe reajustar la longitud de los cinturones de cinco puntos.

Montaje de los cinturones en la silla PCI

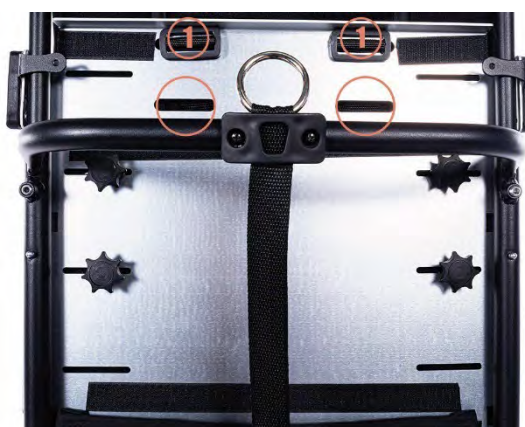

Tire de la hebilla a través de los orificios del respaldo.

Ubicación de montaje de los cinturones de seguridad en la parte trasera del respaldo



Tira de las correas a través de los agujeros y pasa a través de la hebilla del cinturón.



Perno para el montaje de cinturones de seguridad cuando la cuña no está



El lugar donde se ensamblan los cinturones al asiento (donde se ensambla la cuña)

6.17. Reposacabezas




6.18. Soporte de almohadillas toracolumbares ajustables


Ajuste de la longitud de las almohadillas

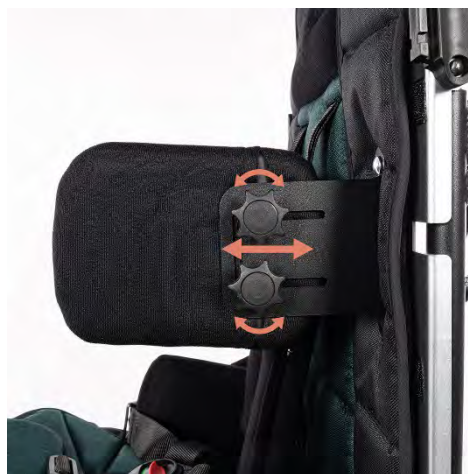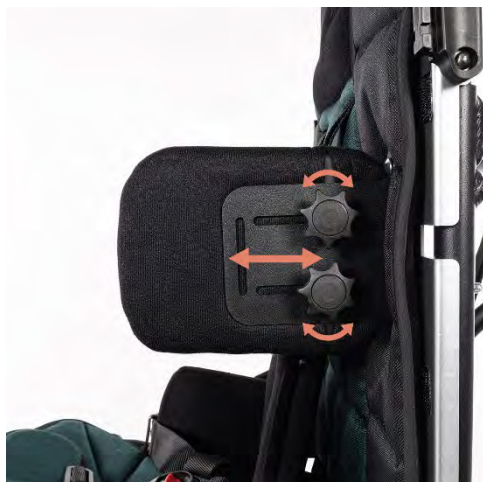

Ajuste de la anchura del respaldo

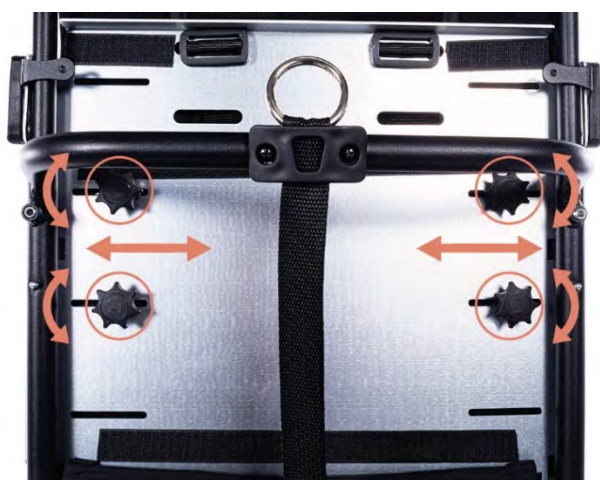

Ajuste de la altura de las almohadillas

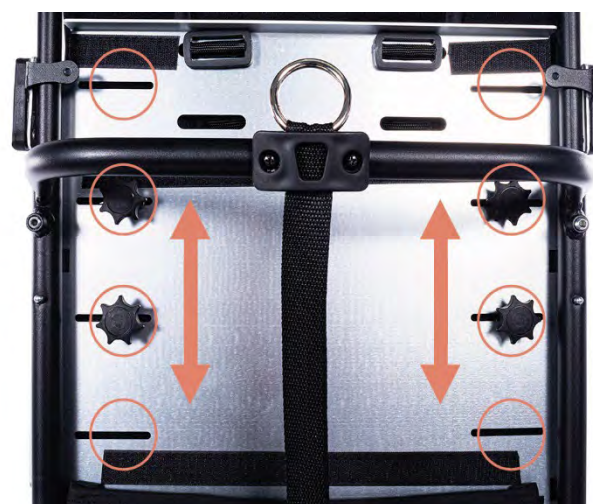

6.19. Almohadillas de cadera ajustables


Ajuste de la altura de las almohadillas



Ajuste de la anchura del asiento



Ajuste de la profundidad del asiento

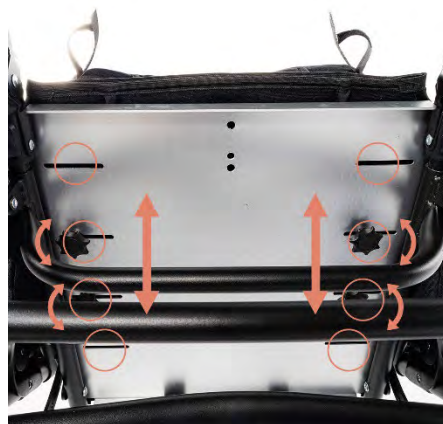


6.20. Elementos laterales del respaldo



6.21. Cinturones de abducción y estabilización



Abrochar los cinturones al asiento

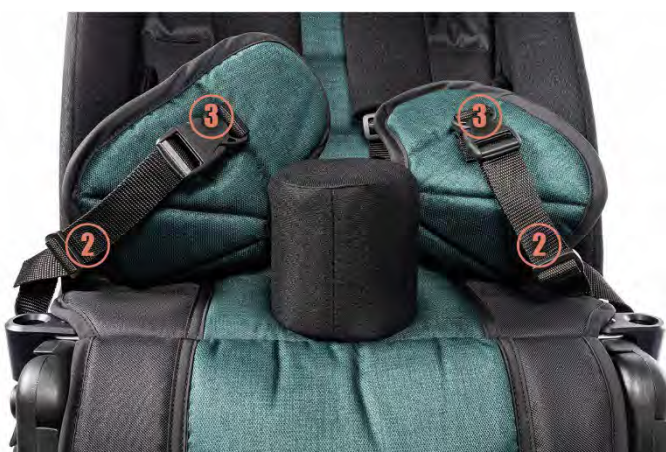

Fijación de los cinturones al chasis



6.22. Barra de seguridad



Presione el botón en ambos lados y deslice la barra de seguridad

6.23. Capota ajustable con ventana

Mecanismo de montaje de la capota al chasis de la silla PCI



Fijación de la capota en el chasis de la silla PCI



Fijación de la capota

Deslice el soporte de la capota en el soporte del marco de la silla PCI.

Extracción con el botón rojo dentro de la montura en la capota en ambos lados.

Cambiar el tamaño del área de la capota.



6.24. Portavasos



7. EQUIPAMIENTO ADICIONAL

7.1. Mesa terapéutica ajustable (colocada en lugar de barrera de seguridad)



La carga máxima es de 3 kg.

7.2. Mochila



La carga máxima de la mochila es de 2kg.

7.3. Bolsa bajo asiento



La carga máxima de la bolsa bajo asiento es de 3 kg.

7.4. Guantes de invierno



7.5. Taco abductor



7.6. Protector para la lluvia



7.7. Saco de dormir



7.8. Mosquitera (unida a la capota ajustable con ventana)



7.9. Sombrilla



8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SILLA PCI ALFA

Longitud de la silla PCI	105-122 cm
Anchura de la silla PCI	66 cm
Altura de la silla PCI	114-127 cm
Peso total	25 kg
Profundidad de asiento efectiva	32-39 cm
Anchura del asiento	22-28 cm*, 41 cm**
Altura del respaldo	58-72 cm
Anchura del respaldo	22-28 cm*, 40 cm**
Distancia entre el reposapiés y el asiento / Número de ajustes	30-39 cm/ 6 posiciones
Longitud de la silla PCI plegado para el transporte	106 cm
Anchura de la silla PCI plegado para el transporte	66 cm
Altura de la silla PCI plegado para el transporte	63,5 cm
Capacidad de la cesta de la compra	3 kg
Capacidad de carga de la mochila	2 kg
Peso máximo del niño	55 kg
Altura máxima del niño	100-150 cm
Ángulo del plano del asiento / Número de ajustes	5.7°-30.1° / 6 posiciones
Ángulo de inclinación del respaldo / Número de ajustes	81,5° - 152° / 8 posiciones
Ángulo del reposapiés / Número de ajustes	72°-193° / 6 posiciones

NOTAS: *) valores dados con almohadillas, ** valores dados sin almohadillas

Tolerancia de los valores de medición +/- 20 mm, +/- 1,5 kg, +/- 1°

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en los parámetros técnicos.

8.1. Composición del material de la silla PCI

Composición del material de la silla PCI: acero con recubrimiento en polvo y aluminio, tejidos 100% poliéster y plástico (PP, PE).

9. ENTREGA Y HERRAMIENTAS

El embalaje original debe incluir los siguientes elementos:



- Manual de usuario
- Equipamiento adicional según pedido.

Antes de usar:

- a. Asegúrese de que el paquete no haya sido dañado. Si se descubre que el paquete está dañado, en presencia del mensajero, desempaque la mercancía y verifique si ninguno de los elementos de la silla PCI ha sido dañado.
- b. Verifique el contenido del paquete y en caso de que falten elementos, comuníquese con su vendedor.

No se requieren herramientas para montar y desmontar la silla PCI ALFA.

Para ajustar la altura del respaldo y la profundidad del asiento, utilice la llave Allen de 4 mm incluida en el paquete.

10. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA SILLA PCI

El producto preempaquetado en la caja original ya está premontado.

- Complete la instalación realizando los siguientes pasos:
 - Despliega el chasis de la silla PCI e instala el respaldo ajustando los siguientes parámetros:
 - activar/desactivar el bloqueo direccional de las ruedas delanteras,
 - ajuste la altura y el ángulo del manillar para empujar la silla PCI,
 - ajustar el ángulo del respaldo,
 - ajustar la profundidad del asiento,
 - ajustar la longitud de los cinturones de cinco puntos,
 - ajuste el reposapiés a la altura deseada,
 - instalar la barra de seguridad,
 - instalar la capota,
 - ajustar los cinturones de abducción y estabilización,
 - Instalar y ajustar: reposacabezas, almohadillas toracolumbares, almohadillas de cadera, elementos laterales del respaldo,
 - Instale el equipo adicional adecuado:
 - cuña

- mochila
- cesta
- saco de dormir para las piernas,
- mosquitero
- cubierta de lluvia,
- sombrilla de sol,
- Portavasos.
- Para desmontar la silla PCI, es necesario:
 - retire el equipo adicional,
 - retire el respaldo del chasis de la silla PCI (consulte la sección 6.10),
 - retire las ruedas traseras del chasis de la silla PCI,
 - Doble el chasis de la silla PCI.

11. PREPARACIÓN PARA EL USO

- Antes de usar la silla PCI, asegúrese de que el calzado del niño sea cómodo y estabilice bien la articulación del tobillo.
- Antes de usar la silla PCI, asegúrese de que el niño no se coloque en la silla PCI sin ropa para cubrir el cuerpo en las áreas de contacto con la tapicería. Esto es para evitar abrasiones en el cuerpo del niño y por razones de higiene.
- Para los niños con problemas de incontinencia, coloque un hule especial en el asiento de la silla PCI, que se puede comprar en farmacias o tiendas médicas.
- En el caso de utilizar cualquier ayuda adicional, como rejillas de ventilación, desagües, bolsas, catéteres, etc., asegúrese de que estén bien protegidos contra caídas, tirones, presiones y que no interfieran con el uso de la silla PCI.

Para comenzar a usar la silla PCI correctamente, debe seguir todos los pasos que se enumeran a continuación:

- Coloque la silla PCI sobre una superficie plana y segura.
- Despliega correctamente la silla PCI (ver sección 6.1).
- Active el freno central.
- Realice todos los ajustes en la silla PCI (consulte la sección 6. Funciones de la silla PCI):
 - a) activar/desactivar el bloqueo direccional de las ruedas delanteras,
 - b) ajustar la altura del manillar de empuje de la silla PCI,
 - c) ajustar la profundidad del asiento,
 - d) ajustar la anchura útil del asiento,
 - e) ajustar el ángulo de inclinación del asiento,
 - f) ajustar la altura del respaldo,
 - g) ajustar el ángulo del respaldo,
 - h) ajustar la longitud del cinturón de cinco puntos,
 - i) ajustar la altura del reposapiés,
 - j) ajustar el ángulo de inclinación del reposapiés,
 - k) ajustar el reposacabezas,
 - l) ajustar las almohadillas toracolumbares,
 - m) ajustar las almohadillas de la cadera,
 - n) ajustar los cinturones de abducción y estabilización

o) ajustar la capota con ventana,

- Retire la barra de seguridad y la mesa de terapia, si este equipo está disponible y montado en la silla PCI.
- Prepárese para ponerse los cinturones de cinco puntos, las correas del reposapiés y los cinturones de abducción y estabilización.
- Coloque al niño en la silla PCI y asegúrese de que todos los ajustes realizados de antemano sean apropiados y seguros para el niño.
- Coloque los cinturones de cinco puntos y las correas del reposapiés del niño.

12. MOVER LA SILLA PCI

La mejor manera de mover la silla PCI es conducirlo sobre sus ruedas.

En los casos en que esto no sea posible (por ejemplo, para transportar la silla PCI en un automóvil), por razones de seguridad, la silla PCI se puede levantar y transportar con ambas manos después de quitar los accesorios para reducir el peso a transportar y plegarlo.

Tenga mucho cuidado al mover o levantar el chasis de la silla PCI. El chasis debe moverse después de plegarlo y colocar el candado de transporte.

No utilice ningún accesorio adicional para mover la silla PCI, ya que corre el riesgo de dañarlo.

13. SUBIR Y BAJAR DE LA SILLA

Al entrar y salir de la silla PCI, coloque la silla PCI lo más cerca posible de un lugar estable y seguro, en el que el usuario vaya a cambiar de posición. Una vez que esté seguro de que el freno central está activo y el reposapiés está levantado para evitar apoyarse sobre él, el usuario puede cambiar su posición.

No se apoye en el reposapiés, ya que existe el riesgo de que la silla PCI se vuelque, lesione al usuario y dañe el producto.

Asegúrese de que al subir y bajar de la silla PCI, el niño y otras personas no se apoyen en el reposapiés, ya que esto puede dañarlo y lesionar al usuario.

14. POSICIÓN CORRECTA EN LA SILLA

Por razones de seguridad y salud, se recomienda que el usuario coloque las caderas y la espalda lo más cerca posible del respaldo para un apoyo uniforme de la columna vertebral (soporte óptimo para todas las partes de la columna para que no se cree espacio libre).

Los muslos deben estar apoyados tanto como sea posible, a lo largo de toda su longitud, lo que se consigue ajustando la profundidad del asiento de la silla PCI; y los pies deben descansar sobre la placa del reposapiés, lo que evita el deslizamiento, mantiene una tensión óptima en los músculos de las piernas y transfiere parte del peso de las partes más altas del cuerpo.



¡ATENCIÓN! Debido a la alta capacidad de ajuste de la silla PCI, durante el ajuste angular del asiento y el ajuste angular del respaldo, es posible establecer una posición en la que la cabeza del niño esté por debajo de la línea pélvica. **Está prohibido utilizar dicha posición,** ya que podría provocar el peligro de asfixia o asfixia del niño.



Posición prohibida de la silla PCI

15. USO DE LA SILLA PCI

Cuando use la silla PCI, siempre sostenga el manillar para empujar la silla PCI y evitar que la silla PCI ruede sin control.

Suelte el freno central mientras sostiene el manillar de empuje de la silla PCI y empuje la silla PCI en una dirección segura.

16. MOVERSE SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS

Siempre coloque la silla PCI hacia adelante cuando suba colinas o rampas. Limite su velocidad en superficies inclinadas y muévase lo más lento posible.

La persona que empuja la silla PCI debe tener la fuerza adecuada para controlar su estabilidad. Tenga siempre en cuenta que la posición del centro de gravedad de la silla PCI cambia al atravesar terrenos irregulares o inclinados. En tal caso, tenga mucho cuidado y asegure la silla PCI.

Cuando use rampas, asegúrese de que la rampa sea adecuada y que las ruedas de la silla PCI sean lo suficientemente altas para sortear la rampa, que el chasis de la silla PCI no entre en contacto con la rampa y que haya una segunda persona disponible para ayudar, ya que existe el riesgo de que la silla PCI se vuelque, dañando el producto y lesionando al usuario.

17. SUPERACIÓN DE UMBRALES O RESTRICCIONES

Al sortear pequeños obstáculos (umbrales pequeños, bordillos pequeños, etc.), presione el pedal de inclinación con el pie y empuje el manillar de la silla PCI hacia abajo y hacia usted, para levantar las ruedas delanteras de la silla PCI y conducir con cuidado las ruedas traseras sobre el obstáculo. Luego, tire lentamente del manillar.

de empuje de la silla PCI hacia arriba desde el suelo para levantar las ruedas traseras de la silla PCI y conduzca con cuidado las ruedas traseras sobre el obstáculo.

18. TRANSPORTE EN EL COCHE Y EN OTROS VEHÍCULOS

- Retire todos los accesorios de la silla PCI y guárdelos en un lugar seguro. Pliega la silla PCI y colócalo en el maletero.

Si la silla PCI desmontado no está en el maletero del coche separado del compartimento de pasajeros, el bastidor de la silla PCI debe fijarse cuidadosamente al vehículo. Para ello, puede utilizar cinturones de seguridad sin usar.

- Para poder transportar una silla PCI en otros vehículos, como trenes, tranvías, autobuses, aviones, barcos, etc., es necesario preguntar a las personas encargadas del transporte en estos medios de transporte sobre las condiciones para un viaje seguro y los requisitos pertinentes.



La silla PCI ALFA no debe usarse como asiento para transportar a un niño en un vehículo.

19. LIMPIEZA Y CUIDADO

La tapicería se puede lavar a máquina hasta 40 °C y debe secarse en la estructura de la silla PCI.

La bolsa bajo asiento debe lavarse a mano (con un paño húmedo).

Las manchas deben eliminarse tan pronto como se formen.

¡ATENCIÓN! No limpie con productos químicos que contengan disolventes o lejía. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso de productos de limpieza inadecuados.

Asegúrese de que el producto esté siempre seco antes de usarlo.

Cuando utilice detergentes dedicados a este tipo de material, siga las instrucciones de uso del detergente.



Lavar a 40°



No usar lejía



No usar secadora



No planchar

20. ALMACENAMIENTO de la silla PCI

La silla PCI limpia debe almacenarse en una habitación limpia, seca y bien ventilada, preferiblemente a 0-35 ° C. Para el almacenamiento a largo plazo, siga adicionalmente los pasos descritos a continuación en el punto "mensualmente".

21. REVISIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS

Para un uso seguro y sin problemas de la silla PCI, es necesario someterla de forma regular y exhaustiva a las inspecciones y servicios que se describen a continuación.

Mantenimiento:

- **Antes de usar la silla PCI:**
 - Verifique la eficiencia del freno central: después de activar el freno central, ambas ruedas traseras de la silla PCI deben estar bloqueadas y no pueden girar.
 - Verifique la fijación de los componentes estructurales - Inspeccione todos los mecanismos de la silla PCI y sus partes móviles, y en particular, preste atención a: el montaje correcto del respaldo en el chasis de la silla PCI, el montaje adecuado de las ruedas, el funcionamiento adecuado de los cinturones de cinco puntos, el funcionamiento correcto del mecanismo de ajuste del ángulo del asiento, el funcionamiento correcto del mecanismo de reclinación del respaldo y el montaje adecuado del reposapiés.
 - Verifique el estado de los neumáticos - Verifique que los neumáticos de las cuatro ruedas no estén dañados o desgastados.
 - Inspección de piezas sólidas del chasis, asiento con respaldo y chasis del reposapiés - Inspeccione visualmente el estado de los perfiles estructurales. Estos componentes no deben estar dañados ni agrietados.
- **Mensualmente:**
 - Limpieza de la silla PCI.
 - Comprobación visual de todos los elementos móviles, cojinetes, mecanismos de ajuste: lubricar con grasa de silicona.
 - Revise todas las conexiones atornilladas para ver si están flojas.

En una situación en la que el usuario de la silla PCI no pueda realizar las actividades mencionadas anteriormente por su cuenta, debería enviar la silla PCI a un punto de servicio especializado en sillas PCI, quien llevará a cabo adecuadamente la inspección y las actividades de mantenimiento necesarias.

NOTA: El fabricante es responsable del correcto funcionamiento de la silla PCI solo si se utilizan piezas y accesorios originales en él.

Todas las reparaciones deben realizarse en Servicios especializados autorizados o directamente en el Fabricante. Las reparaciones de la silla PCI realizadas por cualquier persona que no sea un Servicio autorizado o el Fabricante anularán la garantía. El Fabricante no es responsable de las lesiones o daños del producto que puedan ser consecuencia de reparaciones realizadas por personas que no sean el Servicio autorizado o el Fabricante.

22. UTILIZACIÓN

Eliminación y reciclaje: de acuerdo con las normativas específicas de cada país.

23. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PRODUCTOS SANITARIOS

Producto sanitario de clase I de acuerdo con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios. Existe una declaración de conformidad adecuada para el producto, que está disponible en www.mywam.eu

Garantía

En el caso de una reclamación **el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.**

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien; para cualquier duda o reclamación, puede enviarnos un e-mail a incidencias@wellell.com o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que WELLELL entrega el producto al cliente.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar del cliente donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto, es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

WELLELL declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligroso de esta silla, por su falta de mantenimiento o por no seguir las indicaciones del manual de uso.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a WELLELL.

Be well, Live well

Wellell



- MyWam sp. z o.o., ul. Lwowska 34, 41-500 Chorzów, Poland
- +48 32 733 11 31
- mywam@mywam.eu



Wellell Iberia S.L.
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain

CE