

Rampa Sky

Manual de uso



V.3 29/05/2024

MANUAL DE USO RAMPA SKY LIBRO

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la rampa.

Descripción del producto

Abra la caja de embalaje para comprobar que no se han producido desperfectos durante el transporte. En caso de que se hubieran producido daños contacte con el comercio en el que adquirió el producto.

La rampa de aluminio ha sido desarrollada para salvar escalones u otros obstáculos con scooters, sillas de ruedas u otros productos similares.

Precaución

El peso máximo soportado por la rampa es de 300 Kg y tiene una anchura total de 71, 5 cm.

Al utilizar la rampa distribuya el peso de manera uniforme.

Preste atención a que la rampa no esté mojada, ya que puede volverse resbaladiza. Manténgala limpia y seca para su correcto funcionamiento.

Tenga en cuenta que cuando suba la rampa con una silla o scooter no puede superar el ángulo de inclinación que el fabricante recomienda para su silla.

Modelos de rampa

NOMBRE	REFERENCIA	LONGITUD	PESO SOPORTADO
Rampa Sky libro 90 cm	0401067	90 cm	300 Kg
Rampa Sky libro 120 cm	0401068	120 cm	300 Kg
Rampa Sky libro 180 cm	0401069	180 cm	300 Kg

Montaje

Saque la rampa de la caja y colóquela contra una superficie plana y nivelada. A continuación despliegue la rampa y ya estará lista para su uso.

Mantenimiento

Para limpiar la rampa utilice un paño húmedo con agua jabonosa. Seque bien la rampa después de limpiarla. No utilice en ella productos abrasivos.

Garantía

La rampa tiene una garantía de 2 años en los defectos de materiales o de fabricación. Quedan excluidos los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso de que requiera de reparación póngase en contacto con el establecimiento en el que adquirió la rampa.

Garantía

En el caso de una reclamación **el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.**

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien; para cualquier duda o reclamación, puede enviarnos un e-mail a incidencias@wellell.com o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que WELLELL entrega el producto al cliente.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar del cliente donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto, es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

WELLELL declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligroso de esta silla, por su falta de mantenimiento o por no seguir las indicaciones del manual de uso.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a WELLELL.

Be well, Live well
Wellell



WONSH RAMP INDUSTRY CO. LIMITED
13 Nanqin Road, Huangtu Zhen,
Jiangyin city, Jiangsu Prov.
P.R. China 214445



Wellell Iberia S.L.
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain



Wellell Iberia S.L.
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain



MEDevice Union, Ltd
26 York Street
London, United Kingdom W1U 6PZ

