

Rampa Salvabordillos

Manual de uso



V.3 29/05/2024

MANUAL DE USO RAMPA SKY SALVABORDILLO

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la rampa.

Descripción del producto

Abra la caja de embalaje para comprobar que no se han producido desperfectos durante el transporte. En caso de que se hubieran producido daños contacte con el comercio en el que adquirió el producto.

La rampa ha sido desarrollada para salvar escalones u otros obstáculos con scooters, sillas de ruedas u otros productos similares.

Precaución

El peso máximo soportado por la rampa es de 270 Kg.

Preste atención a que la rampa no esté mojada, ya que puede volverse resbaladiza. Manténgala limpia y seca para su correcto funcionamiento.

Tenga en cuenta que cuando suba la rampa con una silla o scooter no puede superar el ángulo de inclinación que el fabricante recomienda para su silla.

Modelos de rampa

NOMBRE	REFERENCIA	ANCHO	PESO SOPORTADO
Rampa Sky Salvabordillo 1,5 cm	0401074	14 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 2 cm	0401075	15 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 2,5 cm	0401076	15 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 3 cm	0401077	20 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 3,5 cm	0401078	20 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 4 cm	0401079	20 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 4,5 cm	0401080	25 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 10 cm	0401100	53,5 cm	270 Kg

Montaje

Saque la rampa de la caja y colóquela contra una superficie plana y nivelada. La rampa ya estará lista para su uso.

Mantenimiento

Para limpiar la rampa utilice un paño húmedo con agua jabonosa. Seque bien la rampa después de limpiarla. No utilice en ella productos abrasivos.

Garantía

En el caso de una reclamación el consumidor debe dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.

Garantía

En el caso de una reclamación **el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.**

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien; para cualquier duda o reclamación, puede enviarnos un e-mail a incidencias@wellell.com o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que WELLELL entrega el producto al cliente.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar del cliente donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto, es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

WELLELL declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligroso de esta silla, por su falta de mantenimiento o por no seguir las indicaciones del manual de uso.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a WELLELL.

Be well, Live well
Wellell



WONSH RAMP INDUSTRY CO. LIMITED
13 Nanqun Road, Huangpu Zhen,
Jiangyin City, Jiangsu Prov.
P.R.China 214445



Wellell Iberia S.L.
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain



Wellell Iberia S.L.
Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain



MEDevice Union, Ltd
29 York Street
London, United Kingdom W1U 6PZ

