

Cojines Sedens Series

Manual de uso
V.6 06/02/2026






Sedens 200 Visco



Sedens 100 Gel

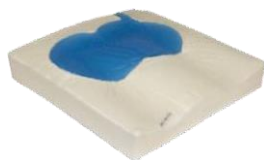

Sedens 210 Visco - Gel



FABRICANTE

HERDEGEN SAS,
46 bis avenue du Maine
75015 PARÍS - Francia
qualité@hacare.com

Copyright 2024 por HERDEGEN SAS - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Con el fin de mejorar continuamente, WELLELL se reserva el derecho de modificar cualquier detalle o especificación de este documento sin previo aviso.

La información contenida en este documento es confidencial. Solo podrá compartirse con terceros con el consentimiento previo por escrito de WELLELL. Este documento no podrá reproducirse ni comunicarse, total o parcialmente, de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea técnico o electrónico, mediante fotocopia, grabación o cualquier sistema de extracción de información o datos.

Puede obtener una nueva copia de este documento de WELLELL poniéndose en contacto con su representante de ventas regional o directamente con WELLELL.

DISTRIBUIDOR

--

	ES
	Explicación de los símbolos
	Siga las instrucciones de seguridad
	Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo
	Identificación y dirección del fabricante
	Peso máximo del paciente
	Conformidad con la normativa CE
	Dispositivo médico
	Peso

ES CONSERVACIÓN




Este documento de acompañamiento debe ser conservado cerca del producto en un lugar destinado a tal fin. Debe mantenerse protegido de cualquier elemento y sustancia que comprometa su perfecta legibilidad.

NORMAS Y PATENTES Los cojines para la prevención de escaras están declarados productos sanitarios en el sentido del Reglamento (UE) 2017/745.

- No utilice en condiciones extremas de temperatura (por encima de los 38° C o los 100°F o por debajo de los 0°C o los 32°F). Si quieres incluir el símbolo tendría que actualizar las temperaturas que esta escrito.
- La funda tiene una base antideslizante y es herméticas por la parte superior.
- Cualquier incidente grave con este producto deberá ser comunicado inmediatamente a su proveedor



Dimensiones		
Sedens 210 Visco - Gel		
41 x 41 x 7 cm	2,60 kg	30 - 120 kg
43 x 43 x 7 cm	2,94 kg	30 - 120 kg
45 x 45 x 7 cm	3,34 kg	30 - 120 kg
Sedens 200 Visco		
38 X 38 X 7 cm	1,02 kg	30 - 120 kg
41 X 41 X 7 cm	1,48 kg	30 - 120 kg
43 x 43 x 7 cm	1,50 kg	30 - 120 kg
45 X 45 X 7 cm	1,88 kg	30 - 120 kg
50 X 43 X 7 cm	1,78 kg	30 - 120 kg
Sedens 100 Gel		
40 x 40 x 2,5 cm	3,70 kg	30-120 kg
43 x 43 x 2,5 cm	4,50 kg	30-120 kg

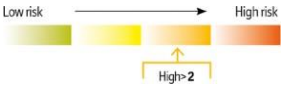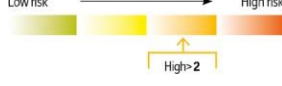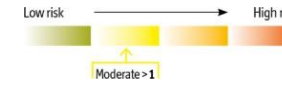		
SEDENS 200 VISCO	SEDENS 210 VISCO - GEL	SEDENS 100 GEL
		



Foam viscoelástica	Densidad	Firmeza	Composición
	86 kg/m3	7,5 kPa	Gel Air 2D: espuma viscoelástica de 86 kg/m3 + capa de gel de polialquileño e isocianato, bolsa de polietileno. Revestimiento: poliuretano con una capa de poliéster (63% PU y 31% PES)
			



PU



3D

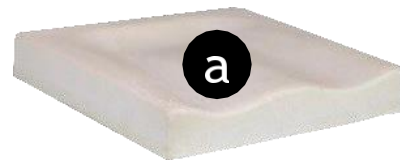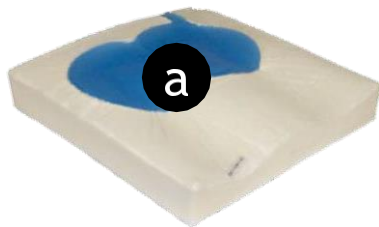

a Parte trasera

ES - Por favor leer estas instrucciones antes de utilizar el producto, y guardarlas para posibles preguntas en el futuro. Si el producto está utilizado por otras personas, tienen que estar avisadas de los consejos de seguridad aquí abajo antes de cada uso.

1. CONSEJOS DE SEGURIDAD, PELIGROS

- Consulte SIEMPRE con su médico o proveedor para determinar el ajuste y el uso adecuados para el dispositivo.
- No almacene las almohadillas de espuma/gel en el exterior, ni las deje al sol (Atención: no las deje en el interior de un coche con altas temperaturas exteriores).
- Almacénela en una estancia seca, en posición plana, para que no se deforme, se estire o se rasgue la película superficial exterior.
- Guarde los cojines de espuma alejados de objetos afilados o bordes puntiagudos para evitar rasgaduras y pinchazos.
- Si se guarda a temperaturas inferiores a los 15°C, desempaquete el cojín y expóngalo durante 30 minutos a una temperatura ambiente > 15°C.
- Transporte las almohadillas en plano para evitar que puedan rasgarse o pincharse.
- Busque grietas en la base de espuma antes de usar el cojín.
- Antes de usar el cojín, asegúrese de que la superficie donde se vaya a colocar no tenga extremos afilados o puntiagudos que pudieran romper la base de espuma.
- No utilice en condiciones extremas de temperatura (por encima de los 38°C o los 100°F o por debajo de los 0°C o los 32°F).
- No se deberán realizar modificaciones en el cojín.
- Asegúrese que el asiento es el adecuado para su cojín.
- Compruebe SIEMPRE si el cojín está correctamente colocado, de forma segura, en su sitio antes de utilizarlo.
- Si utiliza el cojín durante mucho tiempo, pida a alguien de personal técnico que lo revise antes de utilizarlo.
- Respete SIEMPRE el límite de peso que figura en la etiqueta del cojín.

- Utilícelo sólo como cojín y de la forma correcta: no se arrodele ni se ponga de pie encima de él.
- Si notara que aparecen rojeces en su piel, deje inmediatamente de utilizar el cojín y consúltelo con su médico o terapeuta.
- Tenga cuidado cuando coloque el cojín sobre una silla de ruedas. La silla de ruedas ha sido diseñada para ofrecer la estabilidad necesaria durante las actividades diarias normales. Colocar un cojín tendrá un impacto en la posición del centro de gravedad, que podría hacer que la silla de ruedas basculara y cayera.
- Siga los consejos del profesional que le prescribió este dispositivo médico, respete la duración y la frecuencia de uso.
- Si no consiguiera una sensación de comodidad, consulte con un profesional.
 - Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto se comunicará al fabricante (info@wellell.com) y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido.
- La garantía no incluye los daños provocados por cambios estructurales en nuestros productos, un mantenimiento insuficiente, una manipulación o almacenamiento defectuosos o inadecuados, o el uso de piezas no originales. Asimismo, la garantía no incluye las partes o piezas funcionales sometidas al desgaste y la abrasión naturales usuario y/o el paciente.



2. USO PREVISTO, INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

Resulta más fácil evitar las úlceras de presión que tratarlas. Pueden evitarse las úlceras por decúbito (escaras) cambiando con frecuencia de posición de tumbado o de sentado para evitar las tensiones de la piel y minimizar el riesgo de presión en zonas óseas. Entre otras estrategias a aplicar cabe señalar la atención de la piel, las inspecciones regulares de la piel y una buena nutrición. Consulte con un profesional.

El uso de un cojín de gel o de espuma podría ayudar a aliviar la presión y asegurarse de que el cuerpo esté correctamente posicionado en la silla.

¿Qué pacientes están en riesgo de úlceras por presión?

Pacientes con movilidad baja o nula debido a su edad, accidente o enfermedad, y que permanecen sentados durante largos períodos. Pacientes que no pueden posicionarse solos. Estos pacientes podrían caer a un lado, hacia adelante o deslizarse hacia abajo.

Los pacientes con piel delgada o frágil y con un riesgo de lesión de alta presión.

Indicaciones :

- Pacientes con riesgo de desarrollar o tener úlceras de presión menores
- Tiempo de sentado prolongado
- Alivio del dolor, redistribución de la presión, reducción de la fricción y fuerzas de cizallamiento
- Nuestros cojines van a : - Aumentar la estabilidad - Mejorar la comodidad - Aumentar la tolerancia en posición sentado

Contraindicaciones:

A determinar por el médico según el estado del paciente (como Sudoración excesiva con riesgo de maceración cutánea, Incapacidad para controlar la micción o la defecación sin usar pañales, Grave defecto cutáneo (úlceras), Superficie de soporte adecuada, Evitar los productos para la incontinencia. Peso del paciente superior al soportado por el producto.

3. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, ALMACENAMIENTO

Los cojines se suministran con una cubierta de 3D o de poliuretano. Los dos tipos de cubierta tienen una base antideslizante y son herméticas por la parte superior.

Funda de PU: Hecha con poliuretano impermeable, tienen un cierre con cremallera, y una o dos asas para facilitar el transporte. Base antideslizante.

Funda 3D: Esta funda tiene una parte superior transpirable 100% poliéster, permitiendo una buena ventilación, lo que reduce la humedad y maceración, para asegurar una superficie limpia y seca. Tiene una o dos asas para facilitar el transporte. Base antideslizante.

Sedens Gel:

Consiste en un compartimiento ignífugo, soldado a alta frecuencia, y lleno con partes de espuma de PE 24kg, con un gel acuoso.

Sedens Visco

Es un cojín de espuma viscoelástica moldeado y con contornos. La espuma viscoelástica es una espuma de «recuperación lenta».

Durante la compresión, la espuma se va adaptando progresivamente a la forma del cuerpo, y una vez eliminado el peso, la espuma retoma lentamente su forma inicial. También reacciona a la temperatura corporal y a la temperatura ambiente, ablandándose con el calor y ajustándose con mayor facilidad a los contornos del cuerpo.

La espuma aumenta la superficie de contacto y maximiza el alivio de presión. La forma del cojín garantiza una buena postura mientras se está sentado e impide que se deslice hacia adelante.

El pomo limita el movimiento hacia adelante de la pelvis y reduce el riesgo de contractura por aducción para el paciente agitado.

Sedens Visco Gel:

Está hecho de una base de espuma viscoelástica moldeada con contornos conectada a un inserto de gel de poliuretano con dos densidades. El gel fluido viscoelástico (almohadilla azul) garantiza un alivio máximo de presión en zonas óseas vulnerables, mientras que el gel regula y la espuma aumentan la superficie de contacto y maximizan el alivio de presión. La forma del cojín garantiza una buena postura mientras se está sentado e impide que se deslice hacia adelante.

Pregunte al personal técnico cómo se instala el cojín.

Almacenamiento: Guarde el cojín en un lugar oscuro, limpio y seco para evitar la exposición a la humedad. Mantenga una temperatura ambiente estable en el área de almacenamiento. Las variaciones extremas de temperatura pueden afectar las propiedades del cojín. Mantenga alejados los objetos punzantes.

4. INSTRUCCIONES DE LAVADO, MANTENIMIENTO

Para lavar la funda:

Quite la funda del cojín.

Fundas de PU:

Las fundas de PU se pueden lavar en la lavadora a 90°C. Séquelas siempre en plano, y alejadas de cualquier fuente de calor. No utilice detergente ni lejía, no introducir en autoclave. Es ignífuga (M1), impermeable y transpirable.

Fundas 3D:

Las fundas de 3D se pueden lavar en la lavadora a 30°C. Séquelas siempre en plano, y alejadas de cualquier fuente de calor. No utilice detergente ni lejía, no introducir en autoclave. No es ignífuga.

Para lavar el cojín:

Quite la funda, enjuáguela ligeramente con un paño húmedo. No

utilice jabón, ni lo sumerja en agua. Tras su limpieza asegúrese de que lo seca bien además de secar con aire el cojín antes de utilizarlo. Vuelva a colocar la funda en el cojín, asegurándose de que la parte posterior de la funda se adapte correctamente a la base de espuma o de gel. La etiqueta que tiene la funda va a marcar la parte posterior de la misma.

Busque roturas, arañazos y pinchazos en el cojín antes de volver a instalar la funda. Si tuviera cualquier problema, póngase en contacto con su personal técnico.

Atención:

No utilice productos corrosivos o clorados al limpiar para evitar daños el cojín o la funda.

Realice controles visuales de la funda y del cojín con regularidad para detectar posibles daños.

Póngase en contacto con su distribuidor en caso de deterioro anormal.

5. RECICLADO

Deseche este producto de acuerdo a la normativa regional de eliminación de residuos.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consultar las fichas técnicas del fabricante. Es un producto biocompatible. La duración garantizada del producto y de sus distintos elementos se especifica en las condiciones comerciales, Este producto es biocompatible. Este producto ha sido homologado por la CE.

Garantía

En el caso de una reclamación **el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.**

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien; para cualquier duda o reclamación, puede enviarnos un e-mail a incidencias@wellell.com o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que WELLELL entrega el producto al cliente.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar del cliente donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto, es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

WELLELL declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligroso de esta silla, por su falta de mantenimiento o por no seguir las indicaciones del manual de uso.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a WELLELL.